

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

JMS 全面覆布

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

手術部位の清潔野の確保を目的に、患者の身体の一部を覆う不織布製品である。不織布／ラミネートフィルムの二層構造、又は不織布／ラミネートフィルム／不織布の三層構造を有する。

**〈構造図（代表図）〉

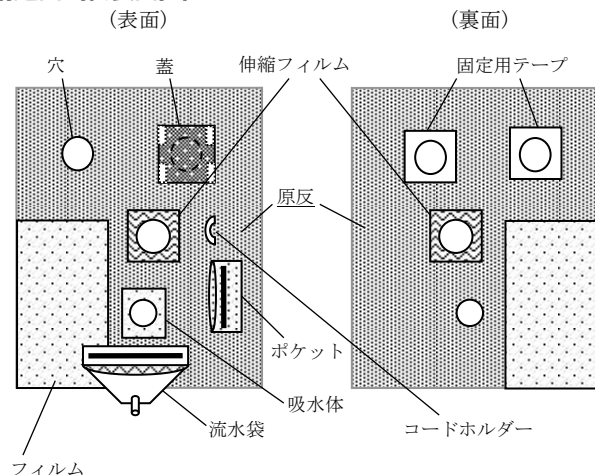

- ・流水袋は患者の排液等を排出する経路を確保するものである。
- ・ポケットは鉗子、セッシン等の小型の医療機器を一時的に収納するものである。
- ・コードホルダーは各種チューブ類を束ねるものである。

**〈原材料〉

部位	原材料
原反	二層 ポリエチレン
	三層 ポリプロピレン系不織布
蓋	二層 ポリエチレン
	三層 ポリプロピレン系不織布
固定用テープ	アクリル系粘着剤、紙、シリコーン処理ポリエチレン紙積層体
伸縮フィルム	ポリウレタン、エチレン/プロピレン共重合体

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出す。
2. 固定用テープ付規格の場合は裏面の固定用テープの剥離紙をはがす。
3. 対象部位を覆う。穴がある規格の場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、裏面の固定用テープで固定する。

**〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

固定用テープを皮膚からはがす際はゆっくり剥がすこと。

*【使用上の注意】

*〈重要な基本的注意〉

- **1. 本品の使用により、皮膚異常が現れた場合は直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。
2. 可燃性消毒薬を用いる場合は、消毒薬の乾燥・気化拡散を確認したのちに、本品で対象部位を覆うこと。[乾燥・気化拡散が不十分な場合、本品下でアルコール蒸気が充満し、電気メスの使用により、引火するおそれがある。]

*〈不具合・有害事象〉

1. その他の不具合
引火
- **2. その他の有害事象
皮膚異常

〈その他の注意〉

消毒用アルコールは可能な限り、本品に付着しないように注意すること。[本品の染料が身体に付着するおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年 [自己認証（当社データ）による]
包装の使用期限欄を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107