

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000
*(ガイドワイヤ挿入コネクタ 70286000)

ナデシコインサーター


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

〈構成〉

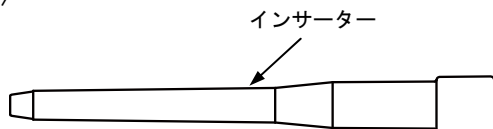

〈仕様〉

項目	性能
破断強度	5N

*【使用目的又は効果】

*マイクロカテーテルをガイドワイヤに挿入するために用いる器具をいう。また、マイクロカテーテル等のコネクタ部に接続してガイドワイヤの挿入を補助することにも使用する。

*【使用方法等】

〈組み合わせて使用する医療機器〉

本品は、以下の医療機器に組み合わせて使用します。

販売名	承認番号
ナデシコ	21200BZZ00459000

〈使用方法〉

1. カテーテルコネクタとして使用する場合

- (1) 包装から本品を取り出します。
- (2) ガイディングカテーテルの二方活栓若しくは止血弁に本品を挿入します。

* (3) 十分に湿潤させたマイクロカテーテルを、本品を介してガイディングカテーテルに挿入します。

* (4) マイクロカテーテルがガイディングカテーテル先端から血管内に挿入されたことを確認したのち、本品を二方活栓若しくは止血弁より抜きます。

(5) 抜いた本品をマイクロカテーテルのストレインリリーフまで移動させ、ストレインリリーフに被せて固定します。

*2. ガイドワイヤ挿入コネクタとして使用する場合

- (1) 包装から本品を取り出します。
- (2) マイクロカテーテルのコネクタ部に本品を挿入します。
- (3) 十分に湿潤させたガイドワイヤを、本品を介してマイクロカテーテルに挿入します。

* (4) ガイドワイヤがマイクロカテーテル先端から血管内に挿入されたことを確認したのち、本品をガイドワイヤ後端より抜きます。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- *1. マイクロカテーテルやガイドワイヤを挿入する際に、先端がつかえたり、抵抗が認められた場合は挿入しないこと。[マイクロカテーテルやガイドワイヤが破損、切断するおそれがある。]
2. 本品をガイディングカテーテルに挿入した状態で、ガイディングカテーテルの二方活栓を操作しないこと。[本品及びマイクロカテーテルが破損、切断するおそれがある。]
3. 本品をメスやハサミ等で損傷しないよう注意すること。

【使用上の注意】

*〈不具合・有害事象〉

*その他の不具合

*破損

*【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3年[自己認証(当社データ)による]

包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

電話番号：082-243-5806