

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

アンセルニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

左右兼用タイプの手袋である。

主 材 料	アクリロニトリルブタジエンゴム
パ ウ ダ	なし
加硫促進剤	あり

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用するニトリルゴム製手袋である。本品は、未滅菌である。

【使用方法等】

取り出し口より手袋を取り出して装着します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 本品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎（IV型・遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）の症状を起こすことがある。体質によっては、かゆみ、発疹等を起こすおそれがある。このような症状が現れた場合は、使用を中止し適切な処置を行うこと。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
- 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。

〈不具合・有害事象〉

- その他の不具合
浸透、膨潤
- その他の有害事象
かゆみ、発疹

【保管方法及び有効期間等】

**〈有効期間〉

使用期限は包装に記載 [自己認証(当社データ)による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107