

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000
ポーテックス・EpiFuse・コネクタ


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

24-1005-64 カテーテルコネクタ

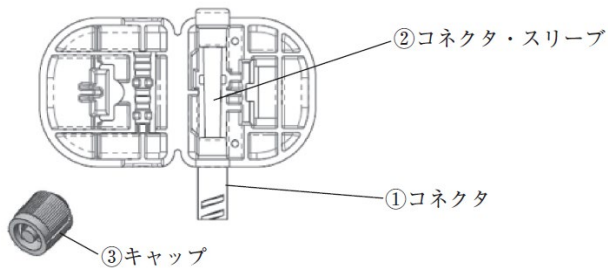

- コネクタは ISO80369-6 に適合
キー



〈原材料〉

No.	名称	原材料名
①	コネクタ	ポリプロピレン
②	コネクタ・スリーブ	熱可塑性エラストマー

〈滅菌方法〉

エチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、硬膜外麻酔用カテーテルをシリンジや麻酔用フィルタ等に接続するために用いる。

【使用方法等】

- (1) 硬膜外麻酔用カテーテルを留置し、硬膜外針を抜去後、カテーテルの体外露出端をコネクタ・スリーブの奥まで差し込みます(図 1 参照)。
- (2) 本品をカチッと音がするまで確実に閉めます(図 2 参照)。
- (3) キャップを外し、コネクタに薬液ラインを接続し、テストドーズを実施します。その際、薬液漏れがないこと、及び薬液が送液できることを確認してください。
- (4) テストドーズの結果、本品を開ける場合は、キー又はルアースリップのシリンジの先端をコネクタ開放穴に入れ、本品が開くまで押します(図 3 参照)。

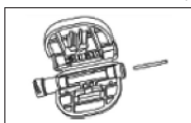


図 1



図 2

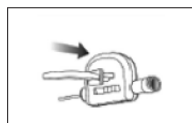


図 3

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。
- 2) 医薬品注入前に接続部を確実に閉めること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

- 1) その他の不具合

- ・ 破損、液漏れ

〈その他の注意〉

- 1) 本品を使用する場合は無菌操作で行い、細心の注意を払うこと〔硬膜外腔や、くも膜下腔の感染を防止するため〕。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・ 保管時(運搬時も含む)は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・ 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証(当社データ)による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※〈製造販売業者〉

ICU メディカルジャパン株式会社

〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

※〈製造業者〉

アイシーユー メディカル, Inc.

ICU Medical, Inc.

〈国名〉

アメリカ合衆国