


機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスター 34858000

リセプタル排液吸引システム (キャニスター)

【形状・構造及び原理等】

*〈形状・構造〉

- 134498201 キャニスター1000mL 用
434230421 キャニスター1500mL 用
434450411 キャニスター2000mL 用
435036118 キャニスター3000mL 用
443000415 キャニスターティアー

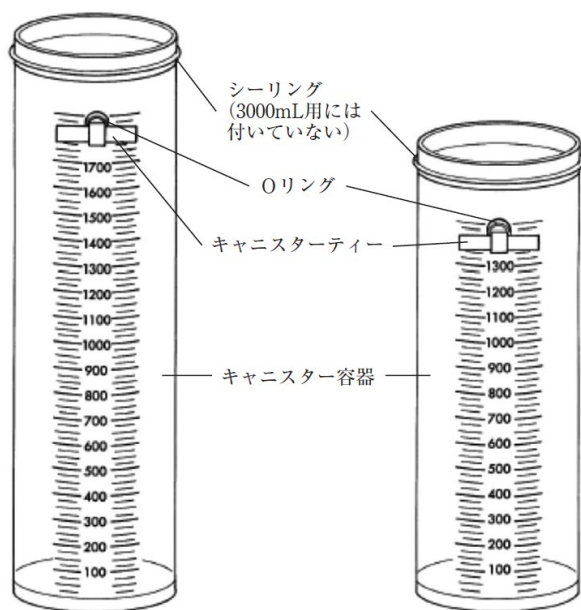

図は 2000mL ライナー用(左)と 1500mL ライナー用(右)

ライナーを保持するための目盛付き円筒型容器である。容量は、1000mL、1500mL、2000mL、3000mL の 4 種類がある。本品は内部にライナーを嵌め合せて、排出液を回収する。

- ・ 未滅菌

【使用目的又は効果】

体液の回収のため吸引器とともに使用するライナー、キャニスター及びその付属品である。

【使用方法等】

1. リセプタル排液吸引システムのライナーの添付文書に従って、適切なサイズのライナーやチューブをセットします。
2. おおよその排液量を確認する際は、患者側ポートの吸引を行っている状態で、キャニスターの目盛を参照して測定します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) キャニスターのサイズに合ったリセプタル排液吸引システムのライナーと併用すること。
- 2) キャニスターの内部を乾燥させておくこと[ライナーのはり付きを避けるため]。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・ 保管時(運搬時も含む)は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用後、キャニスターを院内の規程に従って、洗浄します。なお、血液、体液等が付着した場合は、滅菌してください。本品は、オートクレーブ(121℃)で処理することができます。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**〈製造販売業者〉

ICU メディカルジャパン株式会社

〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

**〈製造業者〉

アムシノ インターナショナル、インク

Amsino International, Inc.

**〈国名〉

アメリカ合衆国