

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000

リセプタル排液吸引システム (アキュメジャー)


再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

433060411 アキュメジャー

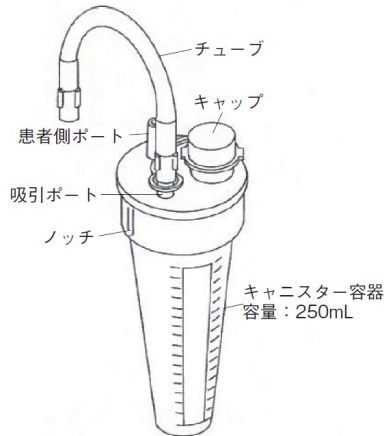

本品は排出液回路に組み込んだ状態で、排出液量を計量することができる。

- ・ 未滅菌

【使用目的又は効果】

体液回収のため吸引器とともに使用するライナー、キャニスター及びその付属品である。

【使用方法等】

A. アキュメジャーの取り付け

1. アキュメジャーの側面にあるノッチをキャニスターに取り付けたブラケットにあわせ、下方に向かって注意しながら差し込みます。
2. アキュメジャーの吸引ポートに、チューブの片側を接続します。
3. チューブのもう一方をライナー（別売）の患者側ポートに接続します。
4. 患者側チューブをアキュメジャーの患者側ポートに接続します。

B. アキュメジャーからライナーへの排出液の移し替え

1. 吸引を続けたまま、アキュメジャー及びライナー双方の患者側ポートの接続と、排出口のキャップが確実に閉まっていることを確認します。
2. ブラケットからアキュメジャーを取り外します。
3. アキュメジャーをゆっくり上下逆にして、排出液をライナーに移します。
4. アキュメジャーを元の向きに戻し、再びブラケットに取り付けます。

C. アキュメジャーの取り外し

1. アキュメジャーの患者側ポートから患者側チューブを取り外します。
2. アキュメジャーのチューブをライナーの患者側ポートから取り外し、アキュメジャーの患者側ポートに接続します。
3. アキュメジャーをブラケットからゆっくりと取り外します。

D. アキュメジャーの廃棄

汚染に注意し、院内の規程に従って、次のいずれかの方法で廃棄します。

1. アキュメジャーをそのままで廃棄します。
2. キャップを取り外し、アキュメジャーを傾けて内容物を空にし、アキュメジャーを廃棄します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) リセプタル排液吸引システムのライナーに接続して使用すること。
- 2) オートクレーブにかけないこと[変形する恐れがあるため]。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合が発生する可能性がある。

* 1) その他の不具合

- ・ 本体の破損

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・ 保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**〈製造販売業者〉

ICU メディカルジャパン株式会社

*〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

**〈製造業者〉

アムシノ インターナショナル、インク

Amsino International, Inc.

**〈国名〉

アメリカ合衆国