

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 輸液用アクセサリセット 70326001

輸液セット用アクセサリ


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

(1) 24-1009-64 NRFit コネクタ用メスキャップ

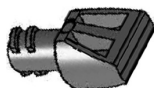

(2) 24-1004-64 NRFit コネクタ用オスキャップ



〈原材料〉

No.	名称	原材料
(1)	NRFit コネクタ用メスキャップ	ABS 樹脂
(2)	NRFit コネクタ用オスキャップ	ポリブチレンテレフタレート

〈滅菌方法〉

エチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

輸液セットなどに用いるアクセサリセットである。キャップ類、コネクタ類、アダプタ類等からなる。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出します。
2. 汚染に注意し、チューブ端のコネクタ等のロック部に回転させながら装着します。
3. 薬液等が漏れないように注意し、速やかに接続してください。
4. 接続部のゆるみがないか十分確認してから、輸液セット等の使用を開始してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。
- 2) アルコールを使用してコネクタを消毒した場合は、完全に乾いてから接続すること。濡れたまま接続すると、滑りにより強く締め付け過ぎ、コネクタが固着あるいはひび割れが発生する可能性がある。ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となるので注意すること。ひび割れが確認された場合には、直ちに新しいものと交換すること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

1) その他の不具合

・ 破損、液漏れ

〈その他の注意〉

- 1) 本品を使用する場合は無菌操作で行い、細心の注意を払うこと
[硬膜外腔や、くも膜下腔の感染を防止するため]。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは、次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・ 保管時(運搬時も含む)は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・ 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること[自己認証(当社データ)による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*〈製造販売業者〉

ICU メディカルジャパン株式会社

〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

*〈製造業者〉

アイシーユー メディカル, Inc.

ICU Medical, Inc.

*〈国名〉

アメリカ合衆国