

PORTEX・麻酔回路セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

670001	ノンラテックス麻酔バッグ	1L
670002	ノンラテックス麻酔バッグ	2L
670003	ノンラテックス麻酔バッグ	3L
670012	ノンラテックス麻酔バッグ	0.5L



接続口 I.D. (内径) 22mm

※〈原材料〉ポリクロロブレン

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、麻酔器に接続して使用する麻酔用呼吸回路セットである。

【使用方法等】

麻酔器の取扱説明書に従って、本器を麻酔器に接続してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品に損傷又は異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・使用前にどの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が附着していないことを確認すること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合が発生する可能性がある。

1) その他の不具合

- ・バックの破損、リーク
- ・ソケットの変形、破損

〈その他の注意〉

- 1) 本品は、絶対に洗浄、滅菌、再使用しないこと [交差感染の原因となったり、滅菌や洗浄剤溶液によって有害物質が残留する恐れがあるため]。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※※〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<https://www.smiths-medical.com/ja-jp>

〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

※※〈製造業者〉

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

※※〈国名〉

アメリカ合衆国