

## PORTEX・麻酔回路セット

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈使用方法〉

- 1)本品は可燃性麻酔薬の存在下で使用しないこと [本品は非導電性であり、爆発の危険性があるため]。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※〈製造販売業者〉

**smiths medical**

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<https://www.smiths-medical.com/ja-jp>

※〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

※〈製造業者〉

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

※〈国名〉


アメリカ合衆国

※【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

ガスサンプリングラインキット

225-3422-800 オス/オスルーア

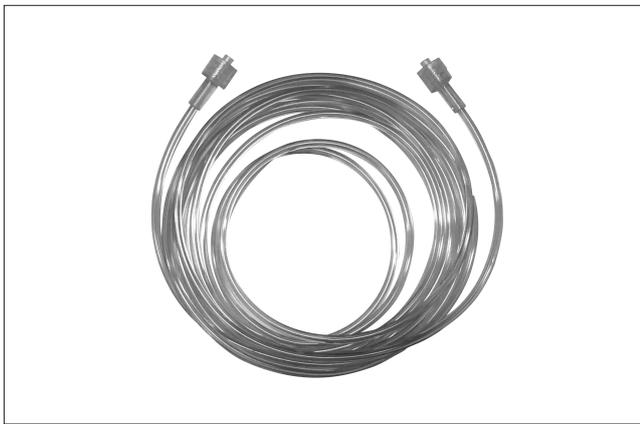

〈原材料〉

- ・ガスサンプリングラインにポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジエチルヘキシル）を使用しています。

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、麻酔器に接続して使用する麻酔用呼吸回路セットである。

【使用方法等】

1. 患者側ガスサンプリングポートと本品を接続します。
2. 本品の他端を呼気ガスモニタと接続します。
3. 呼気ガスモニタが正常に作動することを確認します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1)本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジエチルヘキシルが溶出する恐れがあるので注意すること。
- 2)接続前に呼気ガスモニタメーカーの取扱説明書に従って接続、使用すること。

〈その他の注意〉

- 1)本品は、絶対に洗浄、滅菌、再使用しないこと [交差感染の原因となったり、滅菌や洗浄剤溶液によって有害物質が残留する恐れがあるため]。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。