

ガスサンプリング・アダプタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈使用方法〉

1) 引火性物質のある環境で使用しないこと〔引火又は爆発の誘因となる恐れがあるため〕。

〈併用医療機器〉

1) 本品を放射線機器・MRIの管理区域内及び高圧酸素療法室内で使用しないこと。なお、詳細は【使用上の注意】の〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉を参照のこと。


【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

1100 ストレート・エアウェイ・アダプタ

1105 ストレート・エアウェイ・アダプタ フィルタ付

フィルタ付の製品はポート内腔にフィルタがある。

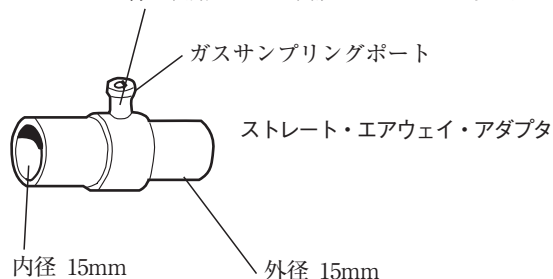

本品は、患者回路から呼吸ガスをサンプリングするためのアダプタである。

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、呼吸回路に接続し、呼吸ガスをサンプリングするために用いる一端が外径15mm、他端が内径15mmの単回使用アダプタである。

【使用方法等】

1. 外径15mm（15mm O.D.）の接続を患者回路にねじ込んで確実に接続してください。
2. 内径15mm（15mm I.D.）の接続を気管内チューブ、気管切開チューブ又はその他の15mm O.D. コネクタ付エアウェイにねじ込んで確実に接続してください。
3. サンプル・チューブを本品のサンプリング・ポートへ接続し、ルーアー・コネクタを回して締めてください。
4. サンプル・チューブの他端を測定機器のモイスチャ・トラップ／フィルタのルーアー・コネクタに接続し、回して締めてください。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) フィルタ付の場合：フィルタが飽和すると、ガスが送られなくなるため、アダプタを交換してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 各ルーアー接続部分は、リークが起らないよう確実に接続すること。

* 2) 本品にリークの疑いがある場合、又は他の異常が認められた場合は、直ちに新品に交換すること。

〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉

1. 併用禁忌

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像装置 (MRI)	MRI走査中に本品を使用しないこと。	誤動作や破損、爆発の誘因となる恐れがある。
高圧酸素療法装置	本品を高圧療法室内で使用しないこと。	誤動作や破損、爆発の誘因となる恐れがある。
放射線機器	本品を使用しないこと。	誤動作や破損、爆発の誘因となる恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

* 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

* 問合せ先

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

〈国名〉

アメリカ合衆国