

ガスサンプリング・チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈使用方法〉

- 1) 引火性物質のある環境で使用しないこと〔引火又は爆発の誘因となる恐れがあるため〕。


【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

サンプル・チューブ

8044 (250cm, オス/オス・ルアーコネクタ)

8211 (120cm, オス/オス・ルアーコネクタ)

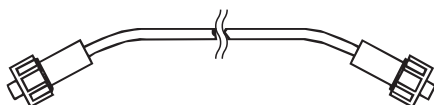

本品は、患者回路から呼吸ガスをサンプリングするためのチューブである。

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、患者へ酸素等を送入したり、患者回路から呼吸ガスをサンプリングするための単回使用チューブである。

【使用方法等】

1. 患者回路に接続したエアウェイ・アダプタのサンプリング・ポートに本品のルアーコネクタを接続してねじって締めてください。
2. サンプル・チューブの他端を測定機器のモイスチャ・トラップ／フィルタのルアーコネクタに接続してねじって締めてください。
3. 使用前に適切に接続され、異常のないことを確認します。又、既知のガスでサンプルし、モニタを確認します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) ルアーコネクタを強くねじって密閉されていることを確認すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ※1) 本品に閉塞やその他の不具合の疑いがある場合は直ちに交換すること。
2) 各ルアー接続部分は、リークが起らないよう確実に接続すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ※・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※（製造販売業者）

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

※（問合せ先）

フリーダイヤル 0120-582-855

※（製造業者）

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

〈国名〉

アメリカ合衆国

※（被包に記載されているシンボルの説明）

シンボル	定 義
	再使用禁止
	注意
	未滅菌
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムラテックスは使用していません
	可塑剤としてDEHPを使用しています
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量