

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012

ポーテックス・ウルトラロック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


〈併用医療機器〉

- 1) 本品をノーマンエルボー・タイプ(コネクタ内部のガス供給用内筒が患者方向に突出した形状)のコネクタに接続しないこと。なお、詳細は【使用上の注意】の〈相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)〉を参照のこと。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

66-1997 ベントロック

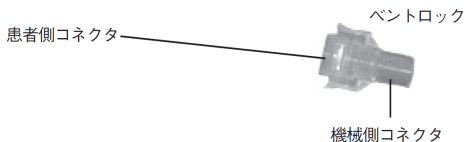

- ・ 機械側接続部は外径 15mm コネクタを、患者側接続部は内径 15mm コネクタを有する。

□ベントロック

- ・ ベントロックは、ワンプッシュで患者側コネクタを着脱できるため、気管の吸引や呼吸回路の再配置等を簡便に行うことができる。
- ・ 患者側コネクタは、スイベルになっており 360°回転する。

〈原理〉

本品は、呼吸回路と気管内チューブ、気管切開チューブ等のエアウェイチューブの間に接続して使用する。スイベル式の回転コネクタを介すことにより、患者が動くことによって起こる呼吸回路のよじれを解消することができ、これらによって発生するチューブの事故抜管や呼吸回路の接続外れのリスクを低減することができる。また、ベントロックは、プレスタブを押すことにより、患者側コネクタを着脱できるため、気管内吸引や呼吸回路の再配置等を行うことができる。

- ・ 未滅菌

【使用目的又は効果】


〈使用目的〉

呼吸回路と気管内チューブ、気管切開チューブ等の接続をより確実にするために用いる。

【使用方法等】

〈使用方法〉

1. 機械側コネクタ(O.D.15mm)を人工呼吸器の Y ピース等に接続してください。
2. 患者側コネクタ(I.D.15mm)を患者の気管切開チューブ等に接続してください。
3. 取り外す時は、「Press」と表示のあるプレスタブをゆっくり押し込みながら、患者コネクタを引き抜いてください。

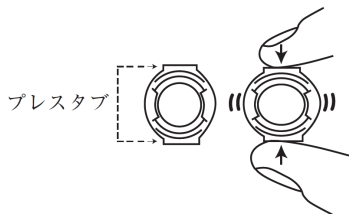

4. 接続し直す時は、「カチッ」というまで、しっかりはめ込んでください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、滅菌せずに廃棄すること。
- 2) 呼吸回路や気管内チューブ等との接続時及び使用中において、各回路接続部が確実且つ適切であることを確認すること。各接続部でリークや閉塞等がないことを確認すること。
 - ・ コネクタの外れには、十分注意すること。

〈相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)〉

1. 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ノーマンエルボー・タイプ(コネクタ内部のガス供給用内筒が患者方向に突出した形状)のコネクタを有する医療機器	本品と接続しないこと。	本品を閉塞させ、肺の過膨張や換気不能を発生させる恐れがある。

〈不具合〉

- ・ 接続部外れ、コネクタの破損、リーク。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 本品を保管するときは、次の事項に注意すること。
- ・ 水濡れ、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・ 本品を保管時(運搬時も含む)は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・ 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること[自己認証(当社データ)による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**〈製造販売業者〉

ICU メディカルジャパン株式会社

*〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

**〈製造業者〉

アイシーユー メディカル, Inc.

ICU Medical, Inc.

〈国名〉

アメリカ合衆国