

## ポーテックス・O2 チューブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### 再使用禁止

##### 〈使用方法〉

- 1) 本品を高温、裸火、又は他の発火源の近くで使用しないこと  
[酸素は支燃ガスであるため]。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 〈形状・構造〉

100/575/022 ポーテックス O2 チューブ



全長:2m

チューブ内径/外径:4mm/6mm

本品は医療ガス供給用のチューブである。ガス供給源と呼吸回路等に接続して用いる。

##### 〈原理〉

本品は、ガス供給源と呼吸回路等に接続することで、患者に酸素ガス又は麻酔ガス等を供給する。

##### 〈原材料〉

ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジイソノニルを使用しています)

・未滅菌

#### 【使用目的又は効果】

##### 〈使用目的〉

本品は、呼吸回路等に接続し、患者に酸素ガス又は麻酔ガス等を供給するために用いる。

#### 【使用方法等】

##### 〈使用方法〉

1. 本品のコネクタをガス供給源に接続します。
2. 本品のチューブ端を呼吸回路(気管切開患者用人工鼻等)に接続します。

#### 【使用上の注意】

##### 〈重要な基本的注意〉

- 1) 使用前にどの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が付着していないこと、適切な酸素流量が投与されていること、本品とガス供給源との接続が確実であることを絶えず確認すること。
- 2) 本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジイソノニルが溶出するおそれがあるので注意すること。

##### 〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

##### 1) 不具合

・チューブ、コネクタの破損

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時(運搬時も含む)は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

##### 〈有効期間〉

・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること[自己認証(当社データ)による]。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### \*\*〈製造販売業者〉

ICU メディカルジャパン株式会社

##### 〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

##### \*\*〈製造業者〉

アイシーユー メディカル, Inc.

ICU Medical, Inc.

##### 〈国名〉

アメリカ合衆国