

DLP 電気メスクリーナー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

<使用方法>

再滅菌、再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造等〕

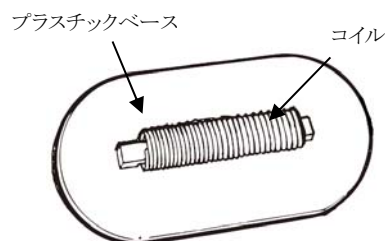

〔原理等〕

本品のコイル間にアクティブ電極を通すことで異物の除去を行う。

【使用目的又は効果】

電気メスのアクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等の除去を目的とした単回使用のクリーナー。

【使用方法等】

1. 滅菌包装を開封し、本品を清潔操作によって清潔野に出す。
2. 本品の底面にある、保護シートをはがし、粘着面をサージカルドレープ等にはり付けて固定することができる。
3. アクティブ電極をコイルの間に通して汚れを取る。
4. 本品の使用後は、本品をサージカルドレープからはがし、廃棄する。

【使用上の注意】

不具合・有害事象

本品は患者体外で使用する電気メスのアクティブ電極に付着した炭化物等の除去を行うクリーナーであり、本品の使用によって患者に直接与える有害事象はない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること。

2. 有効期間

本品の包装に記載された「使用期限」を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本メドトロニック株式会社

カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者: メドトロニック社(米国)

[Medtronic Inc.]