

「アテインガイディングカテーテル A」の付属品 ユニバーサルIIスリッタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止。
 - 2) 再滅菌禁止。

- (2) ガイディングカテーテルのハブをスリッタの刃に当て、X線透視下でリードを造影しながら、ゆっくりとガイディングカテーテルを引く。スリッタの切断面が、ハブ及びカテーテルシャフトの軸線と平行になるように保つ。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法

- 1) ユニバーサルIIスリッタ

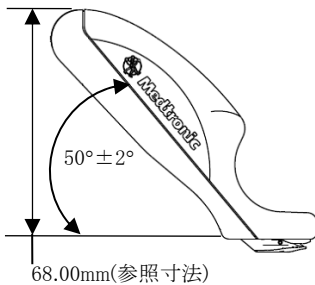

【使用目的又は効果】


1. 使用目的

本品は、アテインリード(承認番号: 21500BZY00222000)等のリード又はアテインバルーンカテーテル(承認番号: 21500BZY00225000)等のバルーンカテーテルを心房及び心室、又は冠状静脈系に導くために用いるガイディングカテーテルである。


【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) スリッタ(ユニバーサルIIスリッタ)の使用法の例
 - (1) ガイディングカテーテルのハブ近くのリードをスリッタの溝に挿入し、保持する。

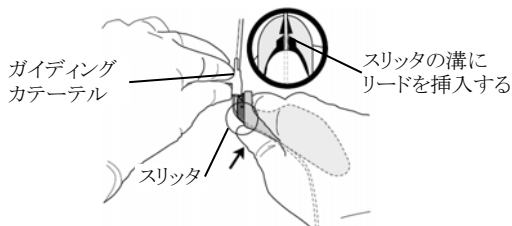

ユニバーサルIIスリッタの保持

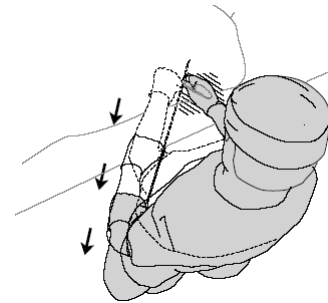

ユニバーサルIIスリッタによるガイディングカテーテルの切断

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 使用前の注意

- 1) 本品の使用にあたり、アテインガイディングカテーテル A の添付文書も参照すること。

2. 使用中の注意

- 1) スリッタを除去する際、ペーシングリードを傷つけないよう十分に注意すること。
- 2) ガイディングカテーテルのスリッティング中およびその後、ガイディングカテーテルのスリットエッジを注意深く操作すること。
- 3) スリッタを前方に押さないこと。[リードの損傷や位置ずれが起こる可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 有効期間

2年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本メドトロニック株式会社
カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者: メドトロニック社(米国)

[Medtronic, Inc.]