

高度管理医療機器

機械器具（31）医療用焼灼器
汎用冷凍手術ユニット

JMDNコード:11067000


『メドトロニック CryoConsole』の付属品 電気アンビリカルケーブル

再使用禁止

＊【禁忌・禁止】 1. 使用方法 1) 再使用禁止 2) 再滅菌禁止	＊＊【保管方法及び有効期間等】 ＊有効期間は 2 年間。 有効期限については外装表示参照。 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売業者：日本メドトロニック株式会社 カスタマーサポートセンター 0120-998-167 製造業者：メドトロニック社（米国） [Medtronic, Inc.]
---	---

【形状・構造及び原理等】

構成品及び種類

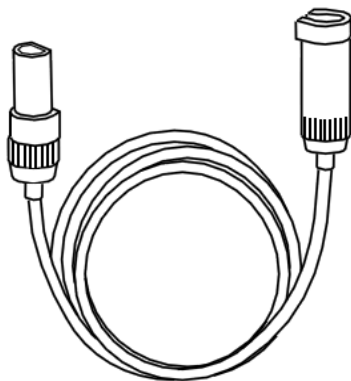

全長：1,219mm

【使用目的又は効果】

本品は、不整脈の治療に使用する冷凍アブレーションカテーテル専用の冷凍手術装置である。

【使用方法等】

1. 電気アンビリカルケーブルを包装から取り出す。
2. 電気アンビリカルケーブルを冷凍アブレーションカテーテルに接続し、電氣的に接続する。
3. 電気アンビリカルケーブルをオートコネクションボックスの CryoCatheter ポートに接続する。
4. 冷凍アブレーションが終了したら、電気アンビリカルケーブルを冷凍アブレーションカテーテル及びオートコネクションボックスから取り外す。