


『メドトロニック CryoConsole』の付属品 オートコネクションボックス

【形状・構造及び原理等】

構成品及び種類

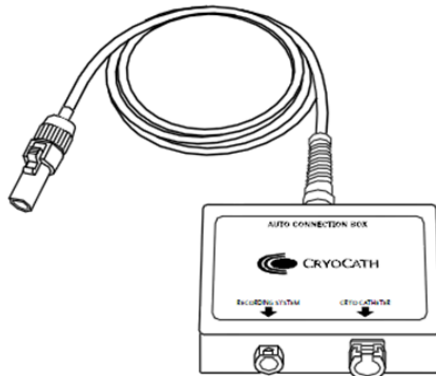

ケーブル長(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行き(mm)
2,438	32	114	76

【使用目的又は効果】

本品は、不整脈の治療に使用する冷凍アブレーションカテーテル専用の冷凍手術装置である。

【使用方法等】

1. オートコネクションボックスをコンソール前面のコネクタポートに接続する。
2. 電気アンビリカルケーブルをオートコネクションボックスの CryoCatheter ポートに接続する。
3. 電気アンビリカルケーブルを冷凍アブレーションカテーテルに接続し、電氣的に接続する。
4. ECG ケーブルを使用する場合は、コンソールのメイン画面が表示されているときに、オートコネクションボックスの Recording System に ECG ケーブルを接続し、院内 EP 記録システムに接続する。
5. 併用するコンソール及び冷凍アブレーションカテーテルの添付文書及び取扱説明書の記載手順に従い、冷凍アブレーションの準備及び治療を行う。
6. 冷凍アブレーション終了後、電気アンビリカルケーブルを冷凍アブレーションカテーテルから取り外す。
7. 電気アンビリカルケーブルをオートコネクションボックスから取り外す。
8. ECG ケーブルを使用した場合は、ECG ケーブルをオートコネクションボックスから取り外す。
9. オートコネクションボックスをコンソールから取り外す。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 意図しない静電気放電(ESD)の危険を最小限に抑えるため、カテーテルを患者に挿入する前に、必ずオートコネクションボックスにカテーテルを接続すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 湿らせた布でオートコネクションボックスの汚れをふき取る。必要な場合は、中性洗剤液またはイソプロピルアルコールを使用する。洗浄後は、よく乾かすこと。
2. 水に浸さないこと。
3. オートコネクションボックスを使用しないときは、コンソール内に収納すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本メドトロニック株式会社

カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者: メドトロニック社(米国)

[Medtronic, Inc.]