


『メドトロニック CryoConsole』の付属品 ECG ケーブル

【形状・構造及び原理等】

構成部品及び種類

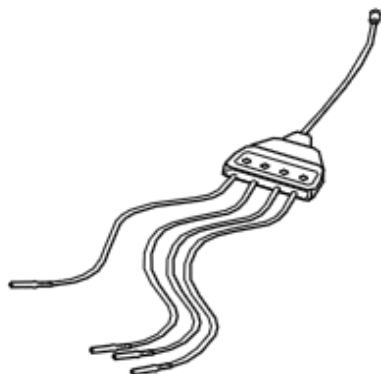

ケーブル長:610mm、ワイヤ長:203mm

【使用目的又は効果】

本品は、不整脈の治療に使用する冷凍アブレーションカテーテル専用の冷凍手術装置である。

【使用方法等】

1. ECG ケーブルの単一ケーブルの端をオートコネクションボックスに接続する。
2. 4つのシールドチップジャックを電気生理学的検査記録システムに接続する。
3. 冷凍アブレーション後、ECG ケーブルをオートコネクションボックス及び電気生理学的検査記録システムから取り外す。

【保守・点検に係る事項】

1. 湿らせた布で ECG ケーブルの汚れをふき取ること。必要な場合は、中性洗剤液またはイソプロピルアルコールを使用する。洗浄後は、よく乾かすこと。
2. 水に浸さないこと。
3. ECG ケーブルを使用しないときは、コンソール内に収納すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:日本メドトロニック株式会社

カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者:メドトロニック社(米国)

[Medtronic, Inc.]