


『メドトロニック CryoConsole』の付属品 フットスイッチ

【形状・構造及び原理等】

構成品及び種類

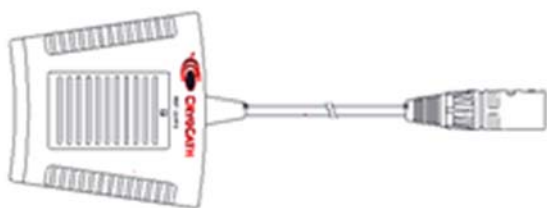

ケーブル長(mm)	ペダル幅(mm)	ペダル長(mm)
3,658	191	165

【使用目的又は効果】

本品は、不整脈の治療に使用する冷凍アブレーションカテーテル専用の冷凍手術装置である。

【使用方法等】

1. フットスイッチのケーブルをコンソールに接続する。
2. 意図しない操作が行われないよう、フットスイッチを適切な場所に配置する。
3. 冷却剤の注入を開始する際は、フットスイッチを 2 秒間踏み込む。
4. 冷却剤の注入を停止する際は、フットスイッチを少なくとも 0.5 秒間踏み込む。
5. 冷凍アブレーション終了後、フットスイッチのケーブルをコンソールから抜き取り、フットスイッチを取り外す。

* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 意図しない操作が行われないよう、フットスイッチは適切な場所に配置すること[冷却剤の注入が不適切に開始または終了するおそれがあるため。]。

【保守・点検に係る事項】

1. 湿らせた布でフットスイッチの汚れをふき取ること。必要な場合は、中性洗剤液またはイソプロピルアルコールを使用する。洗浄後は、よく乾かすこと。
2. 水に浸さないこと。
3. フットスイッチを使用しないときは、コンソール内に収納すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本メドトロニック株式会社

カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者: メドトロニック社 (米国)

[Medtronic, Inc.]