

TB043-M01JA-05


2017 年 10 月改訂（第 5 版）（新記載要領に基づく改訂）
2012 年 3 月改訂（第 4 版）

届出番号：13B1X00007000007

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010
スパイダビュー 12 誘導ケーブル

【形状・構造及び原理等】

1. 外観写真

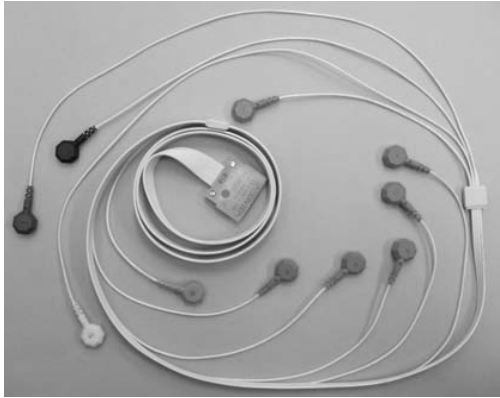

モデル番号：RC015

【使用目的又は効果】

患者の胸部体表面に貼り付けた単回使用心電用電極と長時間心電用データレコーダを接続する際に用いる心電計ケーブルである。

【使用方法等】


併用医療機器

本品と併用して使用する医療機器

販売名	承認番号
シネシリーズ	21000BZY00660000

使用方法

1. 単回使用心電用電極を体表面に貼付する。

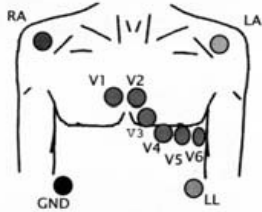

2. 長時間心電用データレコーダに本品を接続する。
3. 体表面に貼付した単回使用心電用電極に本品を装着する。

本品の導線にループをつくってサージカルテープ等で体表面に固定する。



4. 本品に断線がないかどうか確認後、長時間心電用データレコーダを操作し、心電図の記録を開始する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. アーチファクトを起こりにくくするため、導線が引っ張られたときに装着した体表面の単回使用心電用電極が動かないように、必ず導線をたるませてサージカルテープ等で体表面に固定すること。
2. 本品に断線や損傷がないことを確認すること。断線や損傷が認められた場合、本品を使用しないこと。
3. 本品の取り外しは、導線を持って引き抜くなど導線に無理な力をかけないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿をさけて保管すること。
保管温度:0～50℃

【保守・点検に係る事項】

単回使用心電用電極等を使用されている粘着剤が付着した場合は、湿らせた脱脂綿やガーゼで拭き取ること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本ライフライン株式会社
電話：03-6711-5200