

機械器具 54 医療用捲綿子

一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

BD 滅菌綿棒 CA

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・ 再使用禁止

2) 使用期限

使用期限は個包装に記載されている。(自己認証による)

【形状・構造及び原理等】

本品は、プラスチック製の軸の先端にナイロン製の綿球部がついた検体採取用の綿棒であり、滅菌パウチで包装されている。

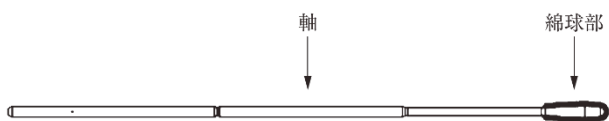

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

TEL：0120-8555-90 (カスタマーサービス)

外国製造業者：

コパン イタリア エスピーエー

(Copan Italia S. p. A.)

国名：イタリア共和国

【使用目的又は効果】

検査のための試料を採取する器具。

【使用方法等】

- 1) 個包装された袋の開口部よりフィルムを剥がし、本品の軸部分をつまんで綿球部に触れないように取り出す。
- 2) 検体を採取する部分に綿球部を当て、検体を採取する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品の使用は1回限りである。再使用はしないこと。
- 2) 再滅菌はしないこと。
- 3) 使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- 4) 開封後は速やかに検体採取を行い、使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。
- 5) 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないこと。
- 6) 検体採取時に軸部分に力がかかり過ぎたり、強く押す等の負荷をかけて軸部を折らないように注意すること。
- 7) 使用中に破損した場合は、速やかに使用を中止し、新しいものを使用すること。
- 8) 検体を採取する時、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう無理な力をかけないこと。
- 9) 凍結や加熱をしないこと。
- 10) 全操作においてスタンダードプリコーション（標準予防策）に従い、適切な防護服（保護服、マスク、ゴーグル、手袋等）を着用すること。併せて、各検査室のガイドラインにも従うこと。
- 11) 医療行為以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

2～30℃にて直射日光、高温多湿、凍結を避け、濡れに注意して保管すること。