

オーセレックスブラシ RT


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、口腔内の細胞採取用ブラシであり、ブラシ先端部は軸より取り外すことができる。本品は、滅菌品である。

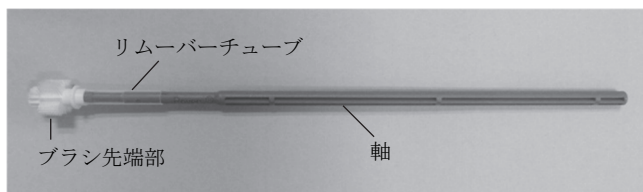



ブラシ先端部の材質：ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

【使用方法等】

1. オーセレックスブラシ RT を取り出す。
2. 口腔内にオーセレックスブラシ RT を軽く押しあてる。(図 1)
3. 同じ方向に 10 回転させて擦過する。(図 2) (口腔底部は少なくとも 5 回転、可能なら 10 回転が望ましい)
4. オーセレックスブラシ RT を抜き取る。
5. 液状処理細胞診標本により標本を作製する。
 - 1) オーセレックスブラシ RT の先端部を蓋の開いたバイアル（固定液）に近づけ、リムーバークューブを押し出してブラシ先端部をバイアルに入れる。(図 3)
 - 2) ブラシ先端部が固定液に浸かっていることを確認し、蓋をしっかりと締める。(図 4)

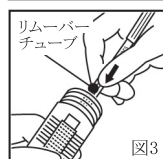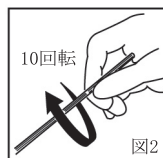

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 作業用手袋は同梱されていないため、別に準備して着用すること。
2. 本品は、口腔内細胞採取用である。他の目的で使用しないこと。
3. 自己採取には使用しないこと。
4. 開封後はすみやかに使用すること。
5. 口腔内より細胞を採取する際に、強く押し当てると組織を傷つ

け出血することがあるので、過剰な力をかけないこと。

6. 製品への強い負荷や他器具との接触による損傷等により、ブラシ先端部、およびリムーバークューブが破損脱落し、誤飲するおそれがあるため、注意すること。
7. ブラシ先端部が使用中に口腔内で外れてしまった場合は、使用を中止し、速やかに取り出すこと。
8. 液状処理細胞診標本作製方法で、ブラシ先端部を軸から取り外す場合には、固定液が飛散しないように注意すること。
9. 全操作においてスタンダードプリコーション（標準予防策）に従い、適切な防護具（保護服、マスク、ゴーグル、手袋等）を着用すること。併せて各検査室のガイドラインにも従うこと。
10. 使用済みのオーセレックスブラシ RT の処理を委託する場合、処理業者等に感染性・有害性を十分告知の上、処理を委託すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿および直射日光を避けて保管すること。

〈有効期間〉

使用期限 ☞ は、包装に記載されている。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
TEL：0120-8555-90（カスタマーサービス）

外国製造業者：

ローバース メディカル デバイス社
(Rovers Medical Devices B.V.)

国名：オランダ