

L S アダプター

【形状・構造及び原理等】

1, 構成品ユニット

本品には、以下の品目がある。

- ・ S-08


・ O-09

・ W-10
- ・ A-11

・ H-22

※本品は、単品で製造販売する場合がある。

2, 各部の名称

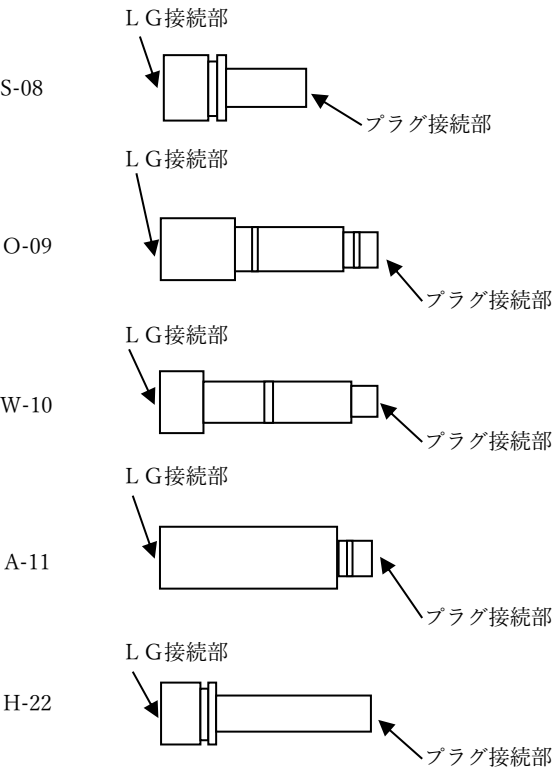

3, **仕様

型式	プラグ形状
S-08	STORZタイプ
O-09	OLYMPUSタイプ
W-10	WOLFタイプ
A-11	ACMIタイプ
H-22	HOYAタイプ

〈作動・動作原理〉

LG接続部にライトガイドケーブルを接続し着脱を行う。

【使用目的又は効果】

ライトガイドケーブルと光源装置を接続するために使用することを目的とする。

**【使用方法等】

〈使用方法〉

- 1, 外装にキズ等がないことを確認する。
- 2, LG接続部をライトガイドケーブルの光源装置接続部へ接続する。
- 3, プラグ部を光源装置へ挿入する。
- 4, 使用後、本品を洗浄し消毒または滅菌して保管する。

〈組合せて使用する医療機器〉

本品は、以下の機器またはその同等品と接続して用いる。

一般的名称：内視鏡用部品アダプタ

販売名	医療機器届出番号
ライトガイドケーブル	19B2X10001000108

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

使用終了後直ぐに本品の洗浄を行うこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

初めて使用する場合は、用途に適したレベルの消毒または滅菌を行うこと。

〈不具合・有害事象〉

＜不具合＞

- ・ 腐食

・ 破損

**【保管方法及び有効期間等】

〈保管環境〉

高温、多湿、ホコリがある所に保管しないこと。

〈有効期間〉

本品の耐用期間は、納入後1年である。「自己認証（当社データ）」による。

本品は、消耗品であり破損した場合は、新しい製品と交換すること。

**【保守・点検に係る事項】

〈洗浄・消毒・滅菌に関する注意〉

- ・ 洗浄後は、残留している薬液を水で洗い流すこと。
- ・ 水分を蒸発させてからオートクレーブ滅菌を行うこと。
- ・ 水分を蒸発させてから低温プラズマ滅菌を行うこと。
- ・ オートクレーブ滅菌後は、本品を急冷しないこと。
- ・ エチレンオキシドガス滅菌後に残留するガスは、人体に有害です。必ずエアレーションを行うこと。
- ・ 滅菌は、シングルまたはダブルの滅菌パックに入れて滅菌すること。

〈洗浄方法〉

- 1, すすぎ
 - 1) 23℃以下の水道水へ2分以上浸漬する。
 - 2) 柔らかい毛のブラシで内視鏡の外装を1分以上ブラッシングする。
- 2, 酵素系洗剤への浸漬
 - 1) 酵素系洗剤を用意する。
 - 2) 本品が入るトレイを用意し、酵素系洗剤を入れる。
 - 3) 本品をトレイに入れ、10分以上浸漬させる。
- 3, すすぎ
水道水で目に見える汚れがすべて除去されるまで、少なくとも1分以上ブラッシングする。
- 4, 乾燥
本品に付着した水分をペーパータオルまたはガーゼ等で除去し乾燥させる。

〈薬液消毒方法及び消毒条件〉

- フタラール系薬液へ浸漬する。
- ・ 使用濃度：原液
 - ・ 作用時間：5分以上

〈滅菌方法及び滅菌条件〉

- 1, オートクレーブ滅菌

種類	真空脱気プレバキューム式高圧蒸気滅菌器（推奨）
温度	134℃または132℃
時間	4分から18分
乾燥時間	45分

- 2, エチレンオキシドガス滅菌

ガス濃度	EOG：20%，CO2：80%
温度	50℃以上
湿度	50%以上
圧力	89kPa
時間	5時間
エアレーション	大気圧12時間以上

- 3, 低温プラズマ滅菌

メーカー名：ASP Japan合同会社
商品：ステラッド®

型式	サイクル
100NX	Duoサイクル
100S	ショートサイクル

〈使用者による保守点検事項〉

外観にキズ等がないことを確認する。

【製造販売業者又は製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： ニスコ株式会社
電話： 055-241-7534

外国製造業者： ILO electronic GmbH
国名： ドイツ連邦共和国