

NITI-ON
Reduced port surgery

器 14 打診器
一般医療機器 打診器 (JMDN コード 11950000)

打診器

【形状・構造及び原理等】

<形状>

(型番 名称 仕様)

01-022 勝沼式 185mm ハケ・針付き



01-023 大貫式 190mm ハケ・針付き



01-024 吉村式 195mm



01-026 テーラー式/米式 200mm



01-025 テーラー式(針付)/新米式 225mm ハケ・針付き



01-027 バギンスキー式打腱器 220mm



<バギンスキー式>

ハンドルを緩めて外し、先端部の脇のネジ穴に取り付けることで、先端部の方向を変更可能。



<ハケ・針付き>

ハンドル後端にハケ・針がねじ込まれている。
(持ち手を押し出すと針が出るが、針はロックされない。)



<原材料>

ハンドル部：真鍮

先端部：合成ゴム、又はシリコーンゴム

*【使用目的又は効果】

本品は、身体に力を伝達させて反射を検査する神経学的検査に用いる。

【使用方法等】

ハンドル部を持ち、先端部で検査部位の打診操作を行なう。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 使用前に本製品に異常があった場合は使用しないこと。
2. 本製品は、使用目的に合わせて繊細かつ精巧に作られているため、変形或いはキズをつける等の粗雑な取り扱い、器具の寿命を著しく低下させることがある。

<不具合・有害事象>

本製品の使用により以下のような不具合・有害事象が起こる可能性がある。

1. 従事者の皮膚の裂傷やグローブの破れ
2. 神経障害

*【保守・点検に係る事項】

<清掃>

製品の汚れを、水または中性洗剤を染み込ませた布で拭き取って下さい。

<修理>

修理や調整は必ず弊社、若しくはお買い上げ販売店にご相談下さい。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社ニチオン

千葉県船橋市栄町 2-12-4 TEL: 047-431-1871