



【禁忌・禁止】

1. 本製品を本来の目的以外で使用しないこと。
[誤った使用法は本品の破損を招く恐れがあるため]
2. 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと。
[振動、切削、打刻等により製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

〈形状〉 (一例)



〈原材料〉

アルミ、真鍮、フッ素樹脂、ナイロン樹脂

【使用目的又は効果】

本製品は、整形外科で使用する医療用のみを叩くために用いる。

【使用方法等】

ハンドル部を握り、先端部のヘッドにて目的物を叩く。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用前に本製品に異常があった場合は使用しないこと。
- 2) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織等が乾燥しないように直ちに洗浄すること。
- 3) アルカリ性や酸性の強い洗剤、又は塩素系の洗剤は使用しないこと。腐食や錆などの原因になります。
- 4) 性能が落ちた場合は、早めに新品に交換すること。
- 5) 135℃を超える高温での滅菌は行わないでください。

2. 不具合・有害事象

本製品の使用により以下のような不具合・有害事象が起こる可能性がある。

1. 本製品の適切な洗浄、滅菌を怠ったために起こる感染。
2. 手術従事者の皮膚の裂傷やグローブの破れ
3. 金属アレルギー

*【保管方法及び有効期間等】

常温、常湿で保管。

*【保守・点検に係る事項】

〈洗浄方法〉

注意：使用後は速やかに洗浄を行って下さい。洗浄前に溶剤、アルコール系洗剤及び、消毒液には漬けないで下さい。
[汚れが凝固し、洗浄・滅菌不良の原因になります。]

1. 使用後は速やかに手洗いによる予備洗浄を十分に行って付着物を取り除いて下さい。柔らかいブラシ等で丁寧に汚れを拭き取って下さい。例えしつこい汚れを取り除く場合であっても金属のブラシは使用しないで下さい。傷がつき、腐食や錆の原因になります。
2. 洗剤は中性のものを使用して下さい。アルカリ性や酸性の強い洗剤は器具のクロム電解層などの保護膜を取り去ってしまいます。
3. 腐食作用の強い塩素系の洗剤は使用しないで下さい。腐食や錆などの原因になります。
4. 洗浄液等は水洗いで完全に洗い流して下さい。洗浄液を完全に洗い落とさないと腐食や錆などの原因となります。
5. 水洗い後、ガーゼなどで水滴を拭き取り、乾燥させて下さい。乾燥していない状態で保管した場合、腐食や錆などの原因となります。
6. 材質の異なる器具と一緒に洗浄しないで下さい。錆や傷などの原因になります。

〈滅菌〉

1. 保守・点検された校正済みの高圧蒸気滅菌器を使用した、以下の条件による滅菌を推奨します。

【推奨滅菌方法】 高圧蒸気滅菌（プレバキューム方式）

滅菌温度	最短暴露時間
121℃	15分
126℃	10分
134℃	3分

※ 135℃を超える高温での滅菌は行わないでください。

(各施設において器具類の滅菌に関して有効性が適切にバリデートされた滅菌サイクルがあれば、上述と異なった滅菌を行うことも可能です。)

〈修理〉

修理や調整は必ず弊社若しくはお買い上げ販売店にご相談下さい。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

株式会社ニチオン

千葉県船橋市栄町 2-12-4

連絡先：(TEL) 047-431-1871 (FAX) 047-431-1878