

類別 機械器具(38) 医療用鉤  
 一般医療機器 (JMDN 35105000) 一般的名称 鉤  
 販売名 HV ハートリトラクター

**【禁忌・禁止】**

1. 使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと [折損・曲がり等の原因になり得る]
2. 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。


**【形状・構造及び原理等】**

1:形状




2:構造


Handle

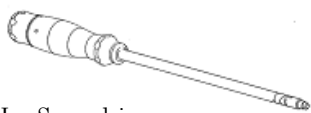


Hex Screwdriver

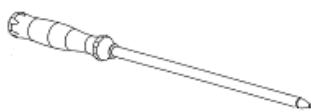

Hinged Blade

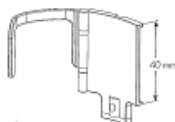

Large Hinged Blade

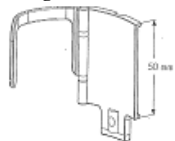

3:原材料:ステンレス鋼

4:原理: 本製品は、Handle 先端に装着した Hinged Blade を創縁に引掛け、牽引、保持等することで、目的部位を露出させる。

**【使用目的又は効果】**

外科手術時に目的の部位を露出させ、縫合、切開等の処置をしやすくする器具である。

**【使用方法等】**

- (1) 本製品は未滅菌のため、必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。滅菌器の使用法、滅菌条件については各施設の滅菌基準又は機器メーカーの添付文書を参照すること。
- (2) 新品の手術器械には防錆油が塗布されているため、適切な方法で防錆油を洗浄除去したのち、滅菌処理を行なうこと。(新品のステンレス製品は、防食効果のもととなる不導体皮膜の形成が不十分なために、機器表面の保護に防錆油が塗布されています。)

**【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

- (1) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
- (2) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、機器の表面を損傷するので、併用しないこと。

\*\* (3) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。

\*\* (4) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

<使用後の洗浄・滅菌に関する注意>

- (1) 使用後は直ちに洗浄作業を実施することを推奨するが、時間が空く場合は血液、体液、組織液及び薬品等が乾燥しないように洗浄液等に浸漬すること。
- (2) 塩素系及びヨウ素系の消毒液は腐食の原因となるのでできるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
- (3) 強アルカリ・強酸性剤の消毒剤は、器械を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器械の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (4) 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥させること。
- (5) 滅菌前に損傷の有無及び動作を確認し点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、ラチェット部等の可動部は開放するなど、確実に滅菌できるよう配慮すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

- (1) 貯蔵保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐ為保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。
- (2) 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

**【保守・点検に係る事項】**

- (1) 本製品は常に日常点検を行い、器具が正常に動くことを確認して使用すること。特に、変形や傷の有無、ネジの緩み等には充分注意すること。
- (2) 使用後は直ちに感染、汚染の防止および器械保護のために予備洗浄を行い、血液・体液・組織液等の汚物を除去し、必要に応じて消毒を行なうこと。
- (3) 汚物除去に用いる洗浄液は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- (4) 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときは、器具同士の接触による損傷が起こらないよう充分注意すること。
- (5) ハンドル部とヒンジ部(ブレード部)は分離し、またヒンジ部(ブレード部)の可動部分は、汚れが落ちやすいように開放して洗浄すること。
- (6) ハンドル部・ヒンジ部(ブレード部)はそれぞれ分解できません。
- (7) 141℃以上の温度で滅菌しないこと。器械に損傷を及ぼします。
- (8) 洗浄後は薬剤の残留がないように充分すすぎを行なうこと。仕上げすすぎには浄化水(蒸留水・脱イオン水等)を使用すること。また、洗浄後は直ちに乾燥させること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\* <製造販売業者>  
 エア・ウォーター・リンク株式会社  
 京都府京都市伏見区竹田向代町 132 番地1  
 問い合わせ窓口/電話番号:075-694-1063

<製造業者>  
 アメリカ合衆国  
 ユーエスビーメディカル社 (USB Medical, Ltd.)