


類別 機械器具(01) 手術台及び治療台
一般医療機器 (JMDNコード: 70469000) 一般的名称 手術台アクセサリ
販売名 Fisso ホールディングシステム (麻酔・集中治療用)

【禁忌・禁止】

1. 洗浄・滅菌不可
2. 使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと [折損・曲がり等の原因になり得る]

【形状・構造及び原理等】

本製品は、以下の様な形状であり、関節アーム、コラム及びクランプから構成される。

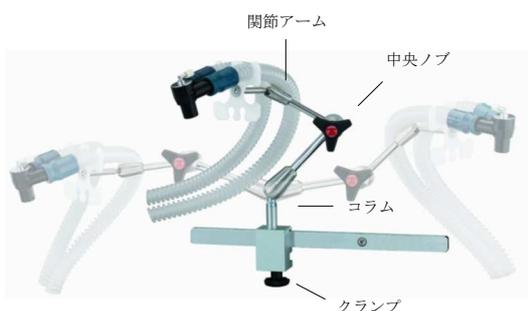

- 2:原材料: ステンレス鋼
ノブ・クランプねじ・一部ヘッドコンポーネント:プラスチック
- 3:原理: 本製品は、関節アーム先端部に付属のパーツを用いて医療用器具、処置具等を取り付け、意図する位置に保持又は調整する。

【使用目的又は効果】

手術時に、医療用器具、処置具等を意図する位置に保持する。

【使用方法等】

設置方法

- (1) 手術台のレールにクランプを挿入し、ネジ部分を締め固定する。
- (2) クランプにコラム(関節アーム付)を挿入し、固定する。
- (3) 先端部分に希望の器具を固定する。

使用方法

関節アームの中央ノブをゆるめ、医療用器具を目的の位置に移動させ調整したのちに、中央ノブを締めて固定する。

本製品は未滅菌品であり、滅菌不可商品です。使用前には、目視、及び動作の確認の上、清拭・消毒を行ってください。
本品の各部は商品の配送前に、完全にネジが固定され、接着剤もしくはピンで補強を行っており、接続済みの部分は分解できません。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に、汚れ・傷・曲がり・損傷・可動部の動き等に異常がないかを点検すること。
- (2) 高周波医療機器と共に使用するには特別な処置が必要なため、高周波医療機器とは本品が接触しないようにすること。
- (3) 設置の際、中央ノブをしっかりと締めて固定すること。完全に固定されていない場合、使用中にゆるみが生じてアームが移動して負傷する恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 貯蔵保管にあたっては、清拭・消毒した後、腐食を防ぐ為保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本製品は常に日常点検を行い、器具が正常に動くことを確認して使用すること。特に、変形や傷の有無、ネジの緩み等には充分注意すること。
- (2) 使用後は直ちに感染、汚染の防止および器械保護のために血液・体液・組織液等の汚物を除去し、必要に応じて消毒を行なうこと。
- (3) 清拭・消毒に使用する薬剤は必要量を使用し、ソフトクロスでふき取ること。ブラシは必ずソフトブラシを使用して、金属ブラシは使用しないこと。中性(pH6.5~8.5)の洗剤を推奨する。溶媒(アルコール等)、過酸化水素等の酸化剤、ハロゲン化合物(塩素系、ヨウ素系等)を使用しないこと。
- (4) 液体には決して浸漬しないこと。
- (5) 潤滑剤は使用しないこと。
- (6) 40℃以上の温度下におかないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * <製造販売業者>
エア・ウォーター・リンク株式会社
京都府京都市伏見区竹田向代町132番地1
問い合わせ窓口/電話番号: 075-694-1063

<製造業者>
スイス Baitella AG