

類別 機械器具(01) 手術台及び治療台
一般医療機器 (JMDN 70469000) 一般的名称 手術台アクセサリ
販売名 ゲルパッド

【禁忌・禁止】

材質に過敏症がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

本品のサイズ・形状の種類の詳細は本品カタログを参照

＜形状例＞

ドーナツ型ゲルヘッドパッド



ゲルハーフボディパッド



ゲルショルダーパッド



ゲルヒールパッド



2. 原材料 パッド：ポリウレタン

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリであり、汎用手術台等に取付けて使用することを目的とする。

【使用方法等】

本品を、患者の術中体位に合わせて汎用手術台等に取付ける。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 使用前に、汚れ、ピンホール、傷、破損、変形がないか点検して使用すること。
- (2) 破損等ある場合は使用しないこと。
- (3) フィルムが破れる危険性があるため、鋭利な機器を本品上に置かないこと。鋭利な器具で本品を傷つけないよう注意すること。
- (4) 患者が横たわっている状態で、ゲルパッドを引っ張らないこと。あまりに強い力を加えると、製品に悪影響を与えます。
- (5) 粗い表面のものや鋭利なものに沿って本品を引っ張らないこと。
- (6) ゲルパッドを切ったり、裂いたりしないこと。
- (7) ゲルパッドを、直火や、極端に温度が高いものにさらさないこと。
- (8) 重量のあるゲルパッドを持ち上げる際は、本品の下側より持ち上げる。
- (9) マジックテープの接着に影響する可能性があるため、マジックテープ等でゲルパッドを固定するのはお勧めしません。
- (10) 【保守・点検に係る事項】に定める方法により点検を行うこと。

【保管方法】

- (1) 平坦な場所に保管すること。
- (2) 大きなゲルパッドは、できるだけ大きく折り曲げること（少なくとも一辺 35cm 以上）。
- (3) 保管の際には、重いものや、鋭利なものを本品上に置かないこと。
- (4) -20℃から 50℃までの直射日光が当たらない場所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 点検

- (1) 本品は常に日常点検を行い、正常に動作することを確認して使用すること。破損、傷の有無等には充分注意すること。
- (2) 本品に異常が認められた場合は、使用しないこと。また、独自で修理を行わないこと。第三者による修理を行った場合、不適切な使用による破損は、メーカー保証の対象外となります。

2. 洗浄、消毒

- (1) 通常の手術室にある中性洗剤を用いて清掃し、酸性洗剤、有機溶剤等は使用しないこと。
- (2) 洗剤や、消毒液に長時間浸さないこと。
- (3) アルコールでの消毒は行わないこと
- (4) オートクレープ滅菌（高圧蒸気滅菌）、ガス滅菌及びプラズマ滅菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* ＜製造販売業者＞

エア・ウオーター・リンク株式会社
京都府京都市伏見区竹田向代町 132 番地 1
問い合わせ窓口/電話番号：075-694-1063

＜製造業者＞

大韓民国
ソン クワン メディテック社 (Sung Kwang Meditech Co., Ltd)