

* 2023 年 8 月 作成（第 1 版）

機械器具（32）医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000
（吸引チューブ 16779000）

再使用禁止

フィルター一体型フタ付き吸引ボトルセット**【禁忌・禁止】****使用方法**

1. 再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】**有効期間**

包装上のラベルの使用期限を参照。

【形状・構造及び原理等】**1. 外観****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者： ドレーゲルジャパン株式会社
住 所： 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル
電 話 番 号： 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者： Dräger Medical Systems Inc.
ドレーゲルメディカルシステムズ社

製 造 国： アメリカ合衆国

2. 原理

吸引器で発生させた陰圧により、吸引ボトルのふたに接続した患者吸引チューブから、患者の分泌物や体液等を吸引する。

【使用目的又は効果】

患者の分泌物や体液等の回収のため吸引器とともに使用する。

【使用方法等】

1. 吸引ボトルにふたをはめてロックする。
2. 吸引器と吸引チューブを接続する。
3. 患者吸引チューブ（本品に含まれない）を接続し、使用する。

組み合わせて使用する医療機器

本体への適合が確認された、製造販売業者が指定する機器と併用すること。

販売名	承認番号	製造販売業者
オープンケアウォーマー Babyroo TN300	30500BZX00200000	ドレーゲルジャパ ン株式会社

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

1. 使用後は、医療用手袋などを必ず着用し、廃液を廃棄物処理に関する規則に従って感染性廃棄物として廃棄すること。[感染のおそれがある。]
2. アルコールなどの有機溶媒を吸引しないこと。[変色・腐食のおそれがある。]

取扱説明書を必ず参照すること