

** 2018 年 11 月改訂(第 6 版)

* 2017 年 09 月改訂(第 5 版) 新記載要領に基づく改訂

承認番号: 20600BZY00178000

機械器具(5) 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
高度管理医療機器 麻酔システム 37710000

カトー ドレーゲル全身麻酔装置 (蛇管、Yピース)

* 【形状・構造及び原理等】

1. 外観

蛇管



Yピース



2. 原理

本体の添付文書を参照すること。

【使用目的又は効果】

本器は麻酔施行中の患者の気道内圧、酸素濃度、吸入ガス温度、呼吸流量、呼気ガス分析、動脈血酸素飽和度、脈拍数および肺コンプライアンスを監視する麻酔用モニターを備えた吸入麻酔器である。

【使用方法等】

使用方法については本体の添付文書や取扱説明書を参照してください。

* 【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 接続部はしっかりと接続し、リークがないことを確認すること。
2. 呼吸回路がねじれていないことを確認すること。[呼吸抵抗が高くなったり、換気がさえぎられる恐れがある。]
3. 結露によって呼吸回路に水分が蓄積されていないかを、定期的に確認すること。[呼吸回路が水分で閉塞する恐れがある。]

* 【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベル中の使用期限を参照

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ドレーゲルジャパン株式会社

住所: 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号: 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者: Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)

ドレーゲルベルク社

製造国: ドイツ連邦共和国