

機械器具(5) 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
高度管理医療機器 麻酔システム 37710000

ドレーゲル全身麻酔装置 アポロシリーズの付属品

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 本品を可燃性または爆発性の混合ガスが発生する恐れのある場所で使用しないこと。[火災の危険があるため。]

併用医療機器「相互作用の項参照」

1. 本品を磁気共鳴画像診断装置(MRI)と併用しないこと。[装置が正常に機能しなくなる恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

① フローセンサ

フローセンサ(5 個入り)

フローセンサ



② アブゾーバ

ドレーゲルソープ・クリック

ドレーゲルソープ・クリック アダプタ



③ 余剰ガス排出システム

余剰ガス排出システム

余剰ガス排出用ホース

移送ホース

バキューム用ホース



2. 原理

本体の添付文書を参照すること。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器とモニタ(呼吸数、気道内圧、換気量、酸素濃度、二酸化炭素濃度、麻酔ガス濃度、動脈血酸素飽和度(SpO₂)、脈拍数、気道内圧と換気量のデータに基づいて算出した肺コンプライアンス)を一体化した吸入麻酔器で、半閉鎖循環麻酔および非再呼吸麻酔の応用ができる麻酔装置である。

【使用方法等】

使用方法については本体の添付文書や取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

フローセンサに関する注意事項

1. フローセンサは熱線方式であるため、センサ内に可燃性の薬剤や物質があると、発火する恐れがある。

アブゾーバに関する注意事項

1. 二酸化炭素吸収剤に長時間、継続的にドライガスを流さないこと。[吸収剤が過度に乾燥し、二酸化炭素吸収能の低下、吸収剤の発熱による吸気ガス温度の上昇、一酸化炭素の生成、吸入麻酔薬の吸収や分解が起こる恐れがある。]

AGSS に関する注意事項

1. 使用前及び使用中は、排出装置の吸引力を確認すること。[過度の吸引により、呼吸システム内が陰圧になる恐れがある。]

相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

使用環境等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 検査室内	併用/ 使用禁止	磁場による吸引、誘導起電力による 事故、誤作動、火傷、爆発の恐れ

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベル中の使用期限を参照

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ドレーゲルジャパン株式会社

住所: 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号: 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者: Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)

ドレーゲルベルク社

製造国: ドイツ連邦共和国