

機械器具(6) 呼吸補助器

管理医療機器 呼吸回路除菌用フィルタ 35070000

再使用禁止

## ドレーゲル除菌用フィルタ（セーフスター）

\*

### 【禁忌・禁止】

#### 使用方法

- 1 再使用禁止

#### 適用対象(患者)

1. 【形状・構造及び原理等】欄に記載されている推奨一回換気量の下限を下回る患者には使用しないこと。  
[一回換気量に対して死腔量が大きくなりすぎ、十分な吸気ガスが供給されなくなること、患者が呼気を再呼吸する恐れがあるため。]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観

本器は以下の3種類から構成される。

##### (1) セーフスター80

デッドスペース：80 mL

一回換気量の推奨範囲：300 ～ 1500 mL



##### (2) セーフスター55

デッドスペース：55 mL

一回換気量の推奨範囲：300 ～ 1500 mL



##### (3) セーフスター60A

デッドスペース：60 mL

一回換気量の推奨範囲：300 ～ 1500 mL



| 番号 | 名称            |
|----|---------------|
| ①  | ハウジング         |
| ②  | フィルタ          |
| ③  | ルアーポート(オプション) |

※(1)～(3)共通

#### 2. 原理

グラスファイバーの間隙により、細菌性病原体を捕捉する。


|          |              |
|----------|--------------|
| バクテリア除去率 | 99.9999 % 以上 |
| ウイルス除去率  | 99.9999 % 以上 |

### 【使用目的又は効果】


呼吸システム及びガスサンプリングラインに用いて、微生物を捕捉し、呼吸システム及びガスサンプリングラインの汚染や別の患者への交差感染を防止すること。

**\*【使用方法等】**

1. 本器を下図のとおり呼吸回路の患者側（図 1 参照）或いは機器側（図 2 参照）に接続する。

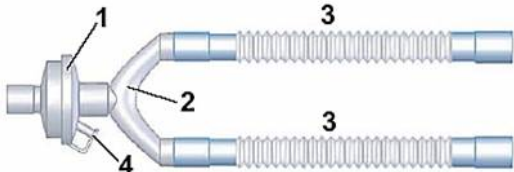

（図 1）患者側への接続図

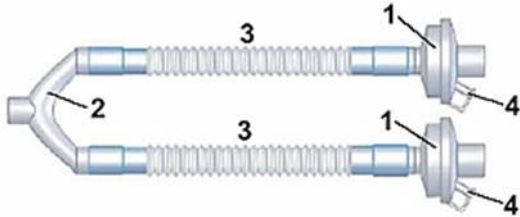

（図 2）機器側への接続図

| 番号 | 名称   | 番号 | 名称            |
|----|------|----|---------------|
| 1  | 本器   | 3  | 呼吸回路          |
| 2  | Yピース | 4  | ルアーポート(オプション) |

2. 本器を麻酔器/人工呼吸器に取り付ける。

**\*【使用上の注意】**

**重要な基本的注意**

- 接続部は、しっかりと接続し、リークがないことを確認すること。
- 定期的に内部をチェックし、水分や目に見える汚れ(分泌物)が確認された場合は、すぐに交換すること。[圧力が上昇し、患者への十分な換気が行われない恐れがある。]
- 加温加湿器又はネブライザと併用する場合は、本品を機器側に接続し、圧力上昇を制御しながら使用すること。[フィルタが閉塞し、換気が困難となる恐れがある。]

**\*【保管方法及び有効期間等】**

**有効期間**

包装上のラベル中の使用期限を参照

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者： ドレーゲルジャパン株式会社

住所： 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号： 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者： ドレーゲルベルク社

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislingner)

製造国： ドイツ連邦共和国