

機械器具 (5) 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路 37704000
(単回使用人工呼吸器呼吸回路 37706000)

再使用禁止

ドレーゲル ディスポーザブル呼吸回路

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止

*【使用方法等】

使用方法につきましては、本体の取扱説明書を参照ください。

1. コネクタのすべてをしっかりと接続する。
2. 呼吸回路を麻酔システムもしくは人工呼吸器に接続した後、患者に使用する前に、システム全体について麻酔システムもしくは人工呼吸器のセルフテストを実施。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観



ドレーゲル
ディスポーザブル呼吸回路
Vent Set Basic



ドレーゲル
ディスポーザブル呼吸回路
Vent Set Flex



ドレーゲル
ディスポーザブル呼吸回路
VentStar Basic (P) 150 w/o
LuerLock

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 接続部はしっかりと接続し、リークがないことを確認すること。
2. 呼吸回路がねじれていないことを確認すること。
[呼吸抵抗が高くなったり、換気がさえぎられる恐れがある。]
3. 結露によって呼吸回路に水分が蓄積されていないかを、定期的を確認すること。[呼吸回路が水分で閉塞する恐れがある。]

*【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベル中の使用期限を参照。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ドレーゲルジャパン株式会社

住所: 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号: 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者: Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)

ドレーゲルヘルク社

製造国: ドイツ連邦共和国

2. 原理

人工呼吸器もしくは、麻酔システムから、吸気管を通して、患者へ空気又は酸素を含むガスを送入する。患者から排出される呼気は呼気管を通り装置へ戻される。

【使用目的又は効果】

麻酔器または人工呼吸器から患者へ空気又は酸素を含むガスを供給する単回使用の呼吸回路。