

機械器具(6)呼吸補助器

管理医療機器 麻酔回路セット 70567000 (呼吸回路セット 70566000)

再使用禁止

ドレーゲルカテーテルマウント ErgoStar

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止

【使用目的又は効果】

麻酔器又は人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いること。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

本器は以下の7種類がある。



ドレーゲルカテーテルマウント
ErgoStar CM40



ドレーゲルカテーテルマウント
ErgoStar CM45



ドレーゲルカテーテルマウント
ErgoStar CM50 (Flex)



ドレーゲルカテーテルマウント
ErgoStar CM55



ドレーゲルカテーテルマウント
ErgoStar CM60



ドレーゲルカテーテルマウント
ErgoStar AC90



ドレーゲルカテーテルマウント
ErgoStar AC95

2. 原理

人工呼吸器もしくは、麻酔システムから、ホースを通して、患者へ空気又は酸素を含むガスを送入する。患者から排出される呼吸はホースを通り装置へ戻される。

*【使用方法等】

1. 接続

麻酔システムもしくは人工呼吸器への接続は、必ず、本品を接続する麻酔システムもしくは人工呼吸器の取扱説明書に従って下さい。

2. 機能のチェック

呼吸回路を麻酔システムもしくは人工呼吸器に接続した後、患者に使用する前に、システム全体について麻酔システムもしくは人工呼吸器のセルフテストを実施して下さい。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 接続部はしっかりと接続し、リークがないことを確認すること。
2. 液体または分泌物が蓄積されていないかを、定期的に確認すること。[抵抗が増加したり、患者の気道に入る恐れがある。]

*【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベルの使用期限を参照

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ドレーゲルジャパン株式会社

住所: 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号: 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者: ドレーゲルヘルク社

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)

製造国: ドイツ連邦共和国