

機械器具(6)呼吸補助器
管理医療機器 単回使用人工呼吸器呼吸回路 37706000

再使用禁止

オキシログ用ディスポーザブル回路


【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

1. 外観

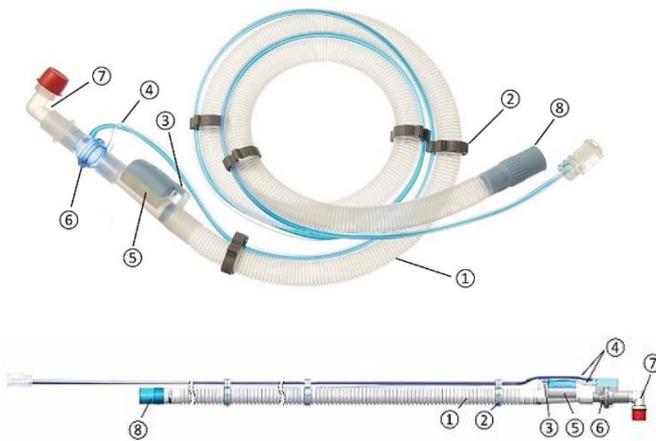

番号	各部の名称
①	ホース
②	圧サンプリングライン固定クリップ
③	呼気バルブ制御チューブ
④	圧サンプリングライン
⑤	呼気バルブ
⑥	フローセンサ
⑦	L字コネクタ
⑧	機械側コネクタ

2. 原理

可搬型人工呼吸器に接続する単回使用のディスポーザブル呼吸回路である。可搬型人工呼吸器からのガスを患者に供給、もしくは患者からの呼気ガスを呼気バルブより排出する。

【使用目的又は効果】

可搬型人工呼吸器からの制御によって、呼気バルブが開閉し、人工呼吸器からのガスが患者に送られる。

【使用方法等】

使用方法

1. 青色の圧サンプリングラインを人工呼吸器の青い接続口に接続してください。
2. 透明の圧サンプリングラインを人工呼吸器のもう一方の接続口に接続してください。
3. ホースを人工呼吸器の吸気ノズルに接続してください。

組み合わせて使用する医療機器

販売名	承認番号
オキシログ 2000	20700BZY00996000

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 接続部はしっかりと接続し、リークがないことを確認すること。
2. 呼吸回路がねじれていないことを確認すること。[呼吸抵抗が高くなり、換気がさえぎられる恐れがある。]
3. 結露によって呼吸回路に水分が蓄積されていないかを、定期的に確認すること。[呼吸回路が水分で閉塞する恐れがある。]
4. 気道内圧チューブに水滴が流入しないよう、チューブの差込口が常に上になるよう設置すること。
5. 気道内圧チューブに水滴が見られた場合は速やかに取り除くこと。[水滴でチューブ内が閉塞し、アラームが誤動作し、適正な換気が維持されない等の恐れがある。]

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベル中の使用期限を参照

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ドレーゲルジャパン株式会社

住所: 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号: 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者: ドレーゲルベルク社

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislingner)

製造国: ドイツ連邦共和国