

機械器具(21) 内臓機能検査用器具  
高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003  
(再使用可能な能動型機器接続体温計プローブ 37340002)

## \*\*患者モニタ Vista 120 の付属品 (体温計プローブ)

### 【禁忌・禁止】

#### 適用対象(患者)

1. 次の材質に対する過敏症のある患者に直腸用体温プローブを使用しないこと。(ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂)

#### 併用医療機器「相互作用の項参照」

1. 本品を磁気共鳴画像診断装置(MRI)と併用しないこと。  
[装置が正常に機能しなくなる恐れがある。]

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観



直腸用体温プローブ 成人用



直腸用体温プローブ 新生児/ 幼児用

#### 2. 原理

本体の添付文書を参照すること。

### \*\*【使用目的又は効果】

重要パラメータ(不整脈検出、無呼吸検出、又は、麻酔等における弛緩薬及び局所麻酔薬の投与量の決定を支援するためのもの)を含む生体情報を収集し、監視すること。

### 【使用方法等】

使用方法については本体の添付文書や取扱説明書を参照してください。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

1. 断線があった場合、直ちに使用を中止すること。
2. 本品を滅菌しないこと。

### 相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医薬品・医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 検査室内	併用/ 使用禁止	磁場による吸引、誘導起電力による事故、誤作動、火傷、爆発の恐れ

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 有効期間

包装上のラベル中の使用期限を参照

### 【保守・点検に係る事項】

#### 使用者による保守点検事項

詳細は、取扱説明書を参照下さい。

- 使用後は、医療施設で定める洗浄、消毒、殺菌手順に基づき、本品のセンサとケーブルの表面全体を処理する。  
希釈していない次亜塩素酸ナトリウム、アセトン、フェノール系、アンモニア系の洗浄剤、高アルカリ性の溶液を使用しないこと。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ドレーゲルジャパン株式会社

住所: 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号: 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者: ドレーゲルヘルク社

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)

製造国: ドイツ連邦共和国