

機械器具16 体温計

管理医療機器 電子体温計 (JMDNコード: 14032010)

コンピュータ基礎体温計BT-14

【警告】


- お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
小さなお子様が電池ケースをいじったり、なめたりして
電池や電池ケースを飲み込まないように注意して下さい。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談して下さい。
- プローブの先端で目を突かないように注意して下さい。
[失明の恐れがあります。]

【禁忌・禁止】

- 分解したり、強くたたいたり、落としたりしないで下さい。
[故障の原因になります。]
- 火気の近くには絶対に置かないで下さい。
[変形や火災の恐れがあります。]
- 水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
[故障の原因になります。]
- 体温計プローブの熱湯消毒や揮発性の液(シンナー等)での
お手入れはしないで下さい。
- 本器を充電やショート等しないで下さい。
又、使用済の電池はテープ等で絶縁して下さい。
[他の電池や金属と混じると発熱、破裂、発火の原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

1) 各部の名称

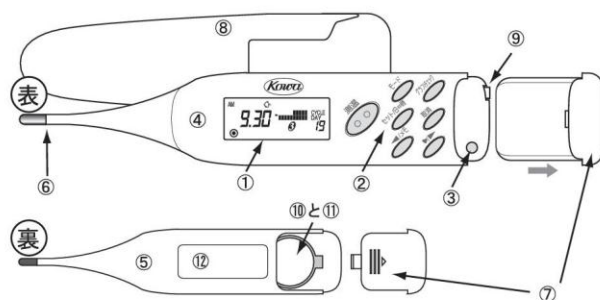

- | | | |
|--------|---------|----------|
| ①表示窓 | ②各操作ボタン | ③リセットボタン |
| ④上ケース | ⑤下ケース | ⑥プローブ |
| ⑦電池カバー | ⑧収納ケース | ⑨通信コネクタ |
| ⑩電池 | ⑪電池ケース | ⑫定格銘板 |

2) 寸法及び質量(収納ケースを含む)

寸 法 : 幅147mm 奥行き33mm 高さ20mm
質 量 : 約43g(電池含む)

3) 電源

電 源 電 圧 : DC3V(CR2032)
消 費 電 力 : 約2mA(測温時)
約30 μ A(時計表示時)
電 池 寿 命 : 約9ヶ月(通常使用状態において)

4) 作動・動作原理

サーミスタの温度変化を発振周波数比較法により測定値を求め
4桁 0.01 $^{\circ}$ C単位で表示する。

【使用目的、効能又は効果】

使用目的

婦人の基礎体温の測定用(5分間測定)

【品目仕様等】

性能

測 定 方 式 : サーミスタによる零勾配検出・
ピークホールド方式
測 温 範 囲 : 34.00 $\sim$ 40.00 $^{\circ}$ C
測 温 精 度 : $\pm$ 0.05 $^{\circ}$ C(35.00 $\sim$ 38.00 $^{\circ}$ C)
 $\pm$ 0.1 $^{\circ}$ C (34.00 $\sim$ 35.00 $^{\circ}$ C, 38.00 $\sim$ 40.00 $^{\circ}$ C)
温 度 表 示 : 4桁 0.01 $^{\circ}$ C単位
使 用 温 度 : 5 $\sim$ 40 $^{\circ}$ C
保 存 温 度 : -10 $\sim$ 50 $^{\circ}$ C
データの記録 : 記録容量は6生理周期分又は210日分
データの表示 : 本装置内カレンダーの日付に連動し、記録された
データをグラフ表示する。
不測温日のデータはブランクとする。
データ出力 : プリンター及びパーソナルコンピュータに対し、記録
された体温データを転送する機能を有する。

取扱説明書を必ずご参照下さい

【操作方法又は使用方法等】

操作の詳細については、付属の取扱説明書をご参照下さい。

- ①初めて使用される時(電池交換時)は、取扱説明書の手順に従い日付、時刻合わせ、アラーム合わせを必ず行ってご使用下さい。
アラーム合わせをしないとデータが記録されません。
- ②基礎体温の正確なデータを得るために、アラーム設定の時刻に毎日測温して下さい。
 - ・アラームが鳴ったらそのまま寝床で測温します。起き上がったりと体温の上昇などで正確な測温値が得られません。
 - ・測温は必ず舌下で行って下さい。
 - ・測温中は口を開けたり話をしないで下さい。
 - ・測温完了はブザーが鳴りお知らせしますが、より正確なデータを得たい場合は、測温開始5分後に2回目の完了ブザーが鳴る迄お続け下さい。
 - ・アラーム設定時刻の前後1時間以内に測温して下さい。
設定時刻以外の測温データは記録しません。
- ③毎回の生理の初日には生理日の入力をして下さい。
正確な基礎体温のデータを活用する為に、必ず行って下さい。
ご使用開始日とそれ以前の生理初日の入力は出来ません。
- ④メモの入力をして、からだの様子や変化を記録して下さい。
データチェック機能を利用することで、より正確な体調管理をすることが出来ます。
- ⑤測温エラー時やメモの入力方法、データチェック機能の使い方については
付属の取扱説明書をご参照下さい。

【使用上の注意】

付属の取扱説明書を必ずよく読み正しくご使用下さい。

- ①基礎体温の正確なデータを得るために、測温は毎日行うようにして下さい。継続的なデータが得られなければ推定データが表示されない恐れがあります。
- ②本器は妊娠や体調の診断を補助的に行うものです。
確定的な診断は必ず医師にご相談下さい。
- ③使用中に♥マーク及び田マークが点灯した場合は、体調の注意信号なので直ちに産婦人科の医師の診断を受けて下さい。
- ④本器は基礎体温を測定する体温計です。目的以外の用途には使用しないで下さい。34～40℃の範囲で通常の体温を測定することは可能です。
- ⑤電池が消耗し、電池消耗マークを表示した時は3日以内に新しい電池(CR2032)と交換して下さい。
- ⑥電池消耗やその他の原因で記録内容が消えてしまった場合、
当社では責任を負いかねます。記録内容をデータチェック機能又はデータ転送機能を利用し記録を残されることをおすすめします。
- ⑦生理周期区分の参考表示は目安としてご使用下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

- ①湿気、直射日光、埃の多い所を避けて室温にて保管して下さい。
- ②使用しない時は電池を抜いて保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- ①しばらく使用せずに、再使用する時は電池容量の確認を行い、容量不足の時は新しい電池(CR2032)と交換した後、取扱説明書の手順に従って日付、時刻合わせ、アラーム合わせを必ず行ってからご使用下さい。
- ②汚れを落とす場合に揮発性の液(シンナー等)でのお手入れはしないで下さい。
- ③ご使用後は乾いた布等で体温計のプローブ部の水気を拭きとり、収納ケースに入れて保管して下さい。

【包装】

1台／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製 造 販 売 元 : 株式会社ニシトモ

〒519-0423 三重県会郡玉城町昼田449-3

TEL:0596-58-6987

FAX:0596-58-6968

製 造 元 : 株式会社ニシトモ

* 発 売 元 : 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

お問い合わせ先 : ☎ 0120-016-987

電話受付時間 : 月～金(祝日を除く)9:00～17:00