

機械器具16 体温計

管理医療機器 電子体温計（JMDNコード:14032010）

# 婦人用電子体温計BT-16

**【警告】**


- お子様の手の届かない場所に保管すること。  
 小さなお子様が電池カバーをいじったり、なめたりして電池や電池カバーを飲み込まないように注意して下さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談して下さい。
- プローブの先端で目を突かないようにして下さい。  
 失明の恐れがあります。

**【禁忌・禁止】**

- 分解したり、強くたたいたり、落としたりしないこと。  
 故障の原因になります。
- 火気の近くには絶対に置かないこと。  
 変形や火災の恐れがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしないこと。  
 故障の原因になります。
- 体温計プローブの熱湯消毒や揮発性の液（シンナー等）でのお手入れはしないで下さい。
- 本器を充電やショート等しないこと。  
 又、使用済の電池はテープ等で絶縁して下さい。他の電池や金属と混じると発熱、破裂、発火の原因になります。

**【形状・構造等】**

1) 各部の名称

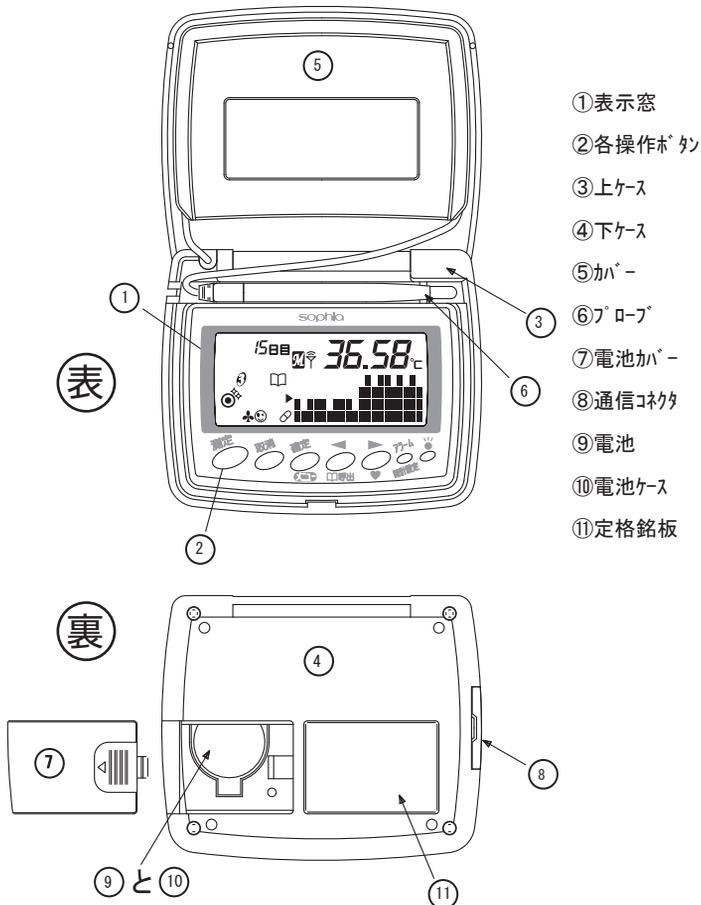

2) 寸法及び質量

寸法 : 縦74mm 横90mm 厚さ22mm

質量 : 約94g（電池含む）

3) 電源

●電源電圧 : DC3V（CR2032）

●消費電力 : 約2mA（測温時）

約30μA（時計表示時）

●電池寿命 : 約6ヶ月（通常使用状態において）

4) 作動・動作原理

サーミスタの温度変化を発振周波数比較法により測定値を求め

4桁 0.01℃単位で表示する。

5) EMC適合

本製品はEMC規格 JIS T 0601-1-2:2002に適合している。

**【性能・使用目的】**

測温部を部位に接触させて、口腔（舌下）の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。

**【品目仕様】**

- 種類 : 婦人用・測温部一体形・一部防浸形
- 測定方式 : サーミスタによる零勾配検出・ピークホールド方式（実測式）
- 測温範囲 : 34.00~42.00℃
- 測温精度 : ±0.05℃（35.00~38.00℃）  
±0.1℃（34.00~34.99℃, 38.01~42.00℃）
- 温度表示 : 4桁 0.01℃単位
- 使用温度 : 10~40℃
- 保存温度 : -20~60℃
- 測定範囲外告知 : 34.00℃未満 Lo  
42.01℃以上 Hi
- データの記憶 : 記憶容量は12生理周期分又は500日分
- データの表示 : 本装置内カレンダーの日付に連動し、メモリされたデータをグラフ表示する。不測温日のデータはブラックとする
- データ出力 : プリンター及びパーソナルコンピュータに対し、メモリされた体温データを転送する機能を有する

取扱説明書を必ずご参照ください

## 【操作方法又は使用方法等】

操作の詳細については、付属の取扱説明書をご参照下さい。

### 1) 使用方法

- ①初めて使用される時(電池交換時)は、取扱説明書の手順に従い日付、時刻合わせ、アラーム合わせを必ず行ってご使用下さい。  
アラーム合わせをしないとデータが記憶されません。
- ②基礎体温の正確なデータを得るために、アラーム設定の時刻に毎日測定して下さい。
  - ・アラームが鳴ったらそのまま寝床で測定する。起き上がったりすると体温の上昇などで正確な測定値が得られません。
  - ・測定は必ず舌下で行って下さい。
  - ・測定中は口を開けたり話をしないで下さい。
  - ・測定完了はブザーが鳴りお知らせしますが、より正確なデータを得たい場合は、測定開始5分後に2回目の完了ブザーが鳴る迄お続け下さい
  - ・アラーム設定時刻の前後1時間以内に測定して下さい。  
設定時刻以外の測定データは記憶しません。
- ③毎回の生理の初日には生理日の入力をして下さい。  
正確な基礎体温のデータを活用する為に、必ず行って下さい。  
ご使用開始日とそれ以前の生理初日の入力は出来ません。
- ④体調メモの入力をして、からだの様子や変化を記録して下さい。  
データチェック機能を利用することで、より正確な体調管理をすることが出来ます。
- ⑤測定エラー時やメモの入力方法、データチェック機能の使い方については付属の取扱説明書をご参照下さい。

## 【使用上の注意】

- ①付属の取扱説明書を必ずよく読み正しくご使用下さい。
- ②基礎体温の正確なデータを得るために、測定は毎日行うようにして下さい。継続的なデータが得られなければ推定データが表示されない恐れがあります。
- ③本器は妊娠や体調の診断を補助的に行うものです。  
確定的な診断は必ず医師にご相談下さい。
- ④使用中に♥マーク及び⊕マークが点灯した場合は、体調の注意信号なので直ちに産婦人科の医師の診断を受けること。
- ⑤本器は基礎体温を測定する体温計です。目的以外の用途には絶対に使用しないで下さい。34～42℃の範囲で通常の体温を測定することは可能です。
- ⑥電池が消耗し、電池消耗マークを表示した時は3日以内に新しい電池(CR2032)と交換して下さい。
- ⑦電池消耗やその他の原因で記憶内容が消えてしまった場合、当社では責任を負いかねます。記憶内容をデータチェック機能又はデータ転送機能を利用し記録を残されることをおすすめします。
- ⑧生理周期区分の参考表示は目安としてご使用下さい。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ①湿気、直射日光、埃の多い所を避けて室温にて保管して下さい。
- ②使用しない時は電池を抜いて保管して下さい。

## 【保守点検に係る事項】

- ①しばらく使用せずに、再使用する時は電池容量の確認を行い、容量不足の時は新しい電池(CR2032)と交換した後、取扱説明書の手順に従って日付、時刻合わせ、アラーム合わせを必ず行ってからご使用下さい。
- ②汚れを落とす場合に揮発性の液(シナー等)でのお手入れはしないで下さい。
- ③ご使用後は乾いた布等で体温計のプローブ部の水気を拭き取り収納ケースに入れて保管して下さい。

## 【包装】

1台/箱

## 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 製造販売業者 : 株式会社ニシトモ
- 住所 : 〒519-0423 三重県度会郡玉城町昼田449-3  
TEL : 0596-58-6987  
FAX : 0596-58-6968  
URL : <http://www.nishitomo.com>  
E-mail : [web@nishitomo.com](mailto:web@nishitomo.com)

●お問い合わせ先 : ☎ 0120-01-6987

●製造業者 : 株式会社ニシトモ