

機械器具16 体温計

管理医療機器 電子体温計（JMDNコード：14032010）

婦人用電子体温計BT-17

【警告】


- お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
小さなお子様は電池カバーをいじったり、なめたりして電池や電池カバーを飲み込まないように注意して下さい。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談して下さい。
- プローブの先端で目を突かないように注意して下さい。
[失明の恐れがあります。]

【禁忌・禁止】

- 分解したり、強くたたいたり、落としたりしないで下さい。
[故障の原因になります。]
- 火気の近くには絶対に置かないで下さい。
[変形や火災の恐れがあります。]
- 水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
[故障の原因になります。]
- 体温計プローブの熱湯消毒や揮発性の液（シンナー等）でのお手入れはしないで下さい。
- 本器を充電やショート等しないで下さい。
又、使用済の電池はテープ等で絶縁して下さい。
[他の電池や金属と混じると発熱、破裂、発火の原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

1) 各部の名称

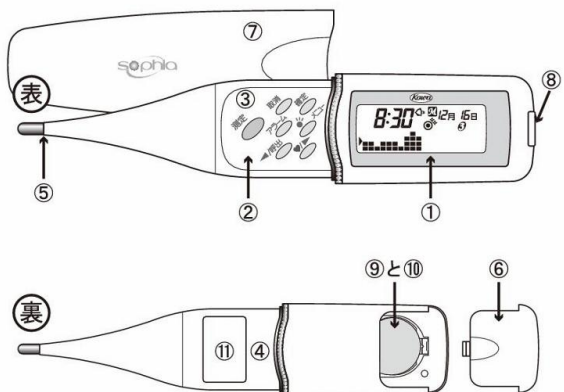

- | | | |
|---------|---------|--------|
| ①表示窓 | ②各操作ボタン | ③上ケース |
| ④下ケース | ⑤プローブ | ⑥電池カバー |
| ⑦収納ケース | ⑧通信コネクタ | ⑨電池 |
| ⑩電池ホルダー | ⑪定銘銘板 | |

2) 寸法及び質量(収納ケース含む)

寸 法 : 幅 153mm 奥行き 32mm 高さ 15.4mm
質 量 : 約 46g(電池含む)

3) 電源

電源電圧 : DC3V(CR2032)
消費電力 : 約 2mA(測温時)
約 30 μ A(時計表示時)
電池寿命 : 約 6ヶ月(通常使用状態において)

4) 作動・動作原理

サーミスタの温度変化を発振周波数比較法により測定値を求め
4桁 0.01 $^{\circ}$ C単位で表示する。

5) EMC 適合

本製品は EMC 規格 JIS T 0601-1-2 : 2002 に適合している。

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて、口腔(舌下)の体温を測定し、
最高温度を保持しデジタル表示すること。

【品目仕様等】

種 類 : 婦人用・測温部一体形・一部防浸形
測定方式 : サーミスタによる零勾配検出・ピークホールド方式(実測式)
測温範囲 : 34.00 ~ 42.00 $^{\circ}$ C
測温精度 : $\pm 0.05^{\circ}$ C (35.00 ~ 38.00 $^{\circ}$ C)
 $\pm 0.1^{\circ}$ C (34.00 ~ 34.99 $^{\circ}$ C, 38.01 ~ 42.00 $^{\circ}$ C)
温度表示 : 4桁 0.01 $^{\circ}$ C単位
使用温度 : 10 ~ 40 $^{\circ}$ C
保存温度 : -20 ~ 60 $^{\circ}$ C
測定範囲外告知 : 34.00 $^{\circ}$ C未満 Lo 表示
42.01 $^{\circ}$ C以上 Hi 表示
データの記録 : 記録容量は 12 生理周期分又は 500 日分。
データの表示 : 本装置内カレンダーの日付に連動し、記録された
データをグラフ表示する。
不測温日のデータはブランクとする。
データ出力 : プリンター及びパーソナルコンピュータに対し、記録された
体温データを転送する機能を有する。

取扱説明書を必ずご参照下さい

【操作方法又は使用方法等】

操作の詳細については、付属の取扱説明書をご参照下さい。

- ①初めて使用される時（電池交換時）は、取扱説明書の手順に従い
日付、時刻合わせ、アラーム合わせを必ず行ってご使用下さい。
アラーム合わせをしないとデータが記録されません。
- ②基礎体温の正確なデータを得るために、アラーム設定の時刻に毎日
測温して下さい。
 - ・アラームが鳴ったらそのまま寝床で測温します。起き上がった
ると体温の上昇などで正確な測温値が得られません。
 - ・測温は必ず舌下で行って下さい。
 - ・測温中は口を開けたり話をしないで下さい。
 - ・測温完了はブザーが鳴りお知らせしますが、より正確なデータ
を得たい場合は、測温開始 5 分後に 2 回目の完了ブザーが鳴る迄
お続け下さい。
 - ・アラーム設定時刻の前後 1 時間以内に測温して下さい。
設定時刻以外の測温データは記録しません。
- ③毎回の生理の初日には生理日の入力をして下さい。
正確な基礎体温のデータを活用する為に、必ず行って下さい。
ご使用開始日とそれ以前の生理初日の入力はできません。
- ④メモの入力をして、からだの様子や変化を記録して下さい。
データチェック機能を利用することで、より正確な体調管理を
することができます。
- ⑤測温エラー時やメモの入力方法、データチェック機能の使い方
については付属の取扱説明書をご参照下さい。

【使用上の注意】

付属の取扱説明書を必ずよく読み正しくご使用下さい。

- ①基礎体温の正確なデータを得るために、測温は毎日行うよう
して下さい。継続的なデータが得られなければ推定データが表示
されない恐れがあります。
- ②本器は妊娠や体調の診断を補助的に行うものです。
確定的な診断は必ず医師にご相談下さい。
- ③使用中に♥マーク及び⊕マークが点灯した場合は、体調の注意信号
なので直ちに産婦人科の医師の診断を受けて下さい。
- ④本器は基礎体温を測定する体温計です。目的以外の用途には
使用しないで下さい。34 ～ 42℃の範囲で通常の体温を
測定することは可能です。
- ⑤電池が消耗し、電池消耗マークを表示した時は 3 日以内に新しい
電池 (CR2032) と交換して下さい。
- ⑥電池消耗やその他の原因で記録内容が消えてしまった場合、
当社では責任を負いかねます。記録内容をデータチェック機能又は
データ転送機能を利用し記録を残されることをおすすめします。
データ転送機能を利用する場合は専用接続ケーブルをご使用下さい。
- ⑦生理周期区分の参考表示は目安としてご使用下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

- ①湿気、直射日光、埃の多い所を避けて室温にて保管して下さい。
- ②使用しない時は電池を抜いて保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- ①しばらく使用せずに、再使用する時は電池容量の確認を行い、容量不足
の時は新しい電池 (CR2032) と交換した後、取扱説明書の手順に従って
日付、時刻合わせ、アラーム合わせを必ず行ってからご使用下さい。
- ②汚れを落とす場合に揮発性の液 (シンナー等) でのお手入れはしないで
下さい。
- ③ご使用後は乾いた布等で体温計のプローブ部の水気を拭き取り、収納
ケースに入れて保管して下さい。

【包装】

1 台／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 ： 株式会社ニシトモ

〒519-0423 三重県度会郡玉城町昼田 449-3

TEL : 0596-58-6987

FAX : 0596-58-6968

製造元 ： 株式会社ニシトモ

* 発売元 ： 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目 4-14

お問い合わせ先： ☎ 0120-016-987

電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00