

婦人用電子体温計KN-21

【警告】


- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
小さなお子様が電池キャップ等をいじったり、なめたりして
電池や電池キャップ等を飲み込まないように注意してください。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 測温部の先端で目を突かないように注意してください。
[失明の恐れがあります。]

【禁忌・禁止】

- 分解したり、強くたたいたり、落としたりしないでください。
[故障の原因になります。]
- 火気の近くには絶対に置かないでください。
[変形や火災の恐れがあります。]
- 本器の熱湯消毒や揮発性の液(シンナー等)でのお手入れは
しないでください。
- 本器を充電したりショートさせたりしないでください。
又、使用済の電池はテープ等で絶縁して廃棄してください。
[他の電池や金属と混じると発熱、破裂、発火の原因になり
ます。]

【形状・構造及び原理等】

1) 各部の名称

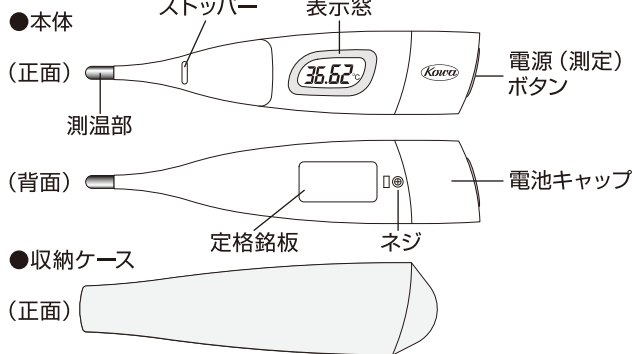

2) 寸法及び質量

寸 法：幅104.2mm 奥行き22mm 高さ12.4mm
(収納ケース含む場合は幅105.7mm 奥行き24.4mm 高さ14.8mm)
質 量：約13g(電池含む)
(収納ケース含む場合は約19g)

3) 電源

電 源 電 圧：DC3V(CR1220×1)
消 費 電 力：約0.9mW(測温時)
電 池 寿 命：約500回(5分実測測定)

4) 作動・動作原理

サーミスタの温度変化を発振周波数比較法により測定値を求め
4桁 0.01℃単位で表示する。

5) EMC適合

本製品はEMC規格 IEC 60601-1-2:2007に適合している。

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて、口腔(舌下)の体温を測定し、最高温度
を保持しデジタル表示すること。

【品目仕様等】

種 類：婦人用・測温部一体形・防浸形
測 定 方 式：サーミスタによる零勾配検出・ピークホールド方式
と約5分間の2段階検出併用の実測式
測 温 範 囲：34.00℃～42.00℃
測 温 精 度：±0.05℃(35.00℃～38.00℃)
±0.1℃(34.00℃～34.99℃、38.01℃～42.00℃)
温 度 表 示：4桁 0.01℃単位
使 用 温 度：10℃～40℃
保 存 温 度：-20℃～60℃
測定範囲外告知：34.00℃未満 Lo表示、42.01℃以上 Hi表示
デ ー タ の 記 録：記録容量7回分
デ ー タ の 表 示：実測測定した体温を4桁で表示

【操作方法又は使用方法等】

操作の詳細については、付属の取扱説明書をご参照ください。

- ① 起床時に、電源(測定)ボタンを押して、口中舌下で測定してくだ
さい。
- ② 基礎体温の正確なデータを得るために、起床時にそのまま寝て
いる状態で測定してください。
起き上がったりと体温の上昇などで正確な測定値が得られ
ません。
・測定は必ず舌下で行なってください。
・測定中は口を開けたり話をしたりしないでください。
・測定完了は、測定開始からおおよそ60秒後に電子音が鳴りお知ら
せしますが、更に正確なデータを得たい場合は、測定開始5分後
に2回目の完了音が鳴るまで測定を続けてください。
- ③ 測定エラー時や測定データの確認方法については付属の取扱説
明書をご参照ください。

【使用上の注意】

付属の取扱説明書を必ずよく読み正しくご使用ください。

- ① 基礎体温の正確なデータを得るために、測定は毎日行なってくだ
さい。
- ② 本器は基礎体温を測定する体温計です。目的以外の用途には使用
しないでください。(34.00℃～42.00℃の範囲で通常の体温を
測定することは可能です。)
- ③ 電池が消耗し、電池消耗マークが表示された時は、速やかに新しい
電池(CR1220)と交換してください。電池消耗マークが表示され
てからおおよそ目安として10回までは測定可能です。
- ④ 電池消耗やその他の原因で記録内容が消えてしまった場合、当社
では責任を負いかねます。測定内容の記録を別途残されることを
おすすめします。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

- ① 湿気、直射日光、ホコリの多い所を避けて室温にて保管してくだ
さい。
- ② しばらく使用しない時は電池を抜いて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ① しばらく使用せずに再使用する時は、電池容量の確認を行い、容量
不足の時は新しい電池(CR1220)と交換した後、ご使用ください。
- ② 口中で使うもので水洗いを行い、いつも清潔にして使用して
ください。本体と収納ケースは水で洗うことができます。
- ③ ご使用後は収納ケースに入れて保管してください。
- ④ 収納ケースに入れるときは、乾いた布等で水気を拭き取ってくだ
さい。
- ⑤ 熱湯消毒や揮発性の液(シンナー等)でのお手入れはしないでくだ
さい。

【包装】

1台/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製 造 販 売 元：株式会社ニシトモ
〒519-0423 三重県会郡玉城町屋田449-3
TEL: 0596-58-6987
FAX: 0596-58-6968

製 造 元：株式会社ニシトモ

発 売 元：興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

お問い合わせ先：☎ 0120-016-987

電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00