

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 34654000

ハイドロエイド

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、合成及び天然高分子材料を基体とする含水ゲルシートである。本品はトレーにモールドされた状態で密封包装されている。

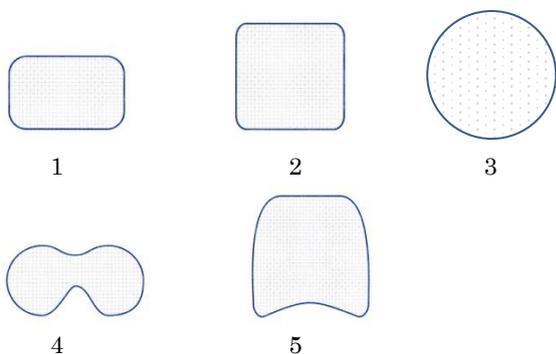

2. 寸法一覧

| 形状 | 品名 | 寸法 | 厚さ |
|----|---------|-----------|-----|
| *1 | 長方形 S | 90×50 | 3 |
| | 長方形 M | 100×60 | 3 |
| | 長方形 L | 120×70 | 3 |
| | 長方形 LL | 280×220 | 3.5 |
| *2 | 正方形 S | 50×50 | 6 |
| | 正方形 M | 100×100 | 3 |
| | 正方形 L | 280×280 | 6 |
| | 正方形 LL | 300×300 | 6 |
| *3 | 円形 S | φ 30 | 6 |
| | 円形 M | φ 50 | 6 |
| | 円形 L | φ 120 | 6 |
| | 円形 LL | φ 300 | 6 |
| 4 | アイマスク | W140×H70 | 3 |
| 5 | フェイスマスク | W250×H250 | 3 |

単位: mm

3. 原理

本品は術後創傷等の創傷のための被覆保護材であり、適用部位に応じて各種の形状・寸法のものがある。本品は体組織に近似の音響特性を持つため、本品の上から創傷部位の超音波画像を得ることも可能である。本品は単回使用である。

【使用目的又は効果】

術後創傷等の創傷のために用いる被覆・保護材である。

取扱説明書を必ずご参照下さい

【使用方法等】

1. 使用前

密封包装に破損、ピンホール等の異常がない事を確認する。

2. 使用方法

- ① 密封包装を切り、本品をトレーと透明箔が付いたままの状態が無菌的に取り出す。
- ② 不織布小片を摘み、透明箔が付いたままの状態本品を対象部位に適用する。この際に、本品に過剰な張力がかからないように注意すること。
- ③ 透明箔を除去する。
- ④ 必要に応じ本品の上から絆創膏等で保護、固定を行う。

3. 使用後

使用後は再使用せず、廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ① 本品は必ず医師の指示・指導の下に使用すること。
- ② 本品使用中に発赤、びらん、掻痒等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合には本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ③ 創面に臨床的感染、又はその恐れがある場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。

2. その他の注意事項

- ① 使用前に密封包装が破損している場合及びその恐れがある場合には使用しないこと。
- ② 密封包装を開封したら直ちに使用すること。
- ③ 本品を再使用・再滅菌しないこと。
- ④ 本品を軟膏等の薬剤と併用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 高温・高湿・直射日光を避け、常温(4℃~25℃)で保管する。本品は凍結させないこと。

有効期間: 製造後2年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称: 日本ビー・エックス・アイ株式会社

*住所: 東京都新宿区四谷本塩町14番1号

*TEL: 03-5315-0191

製造業者

名称: KIKGEL

国名: ポーランド