

医 04 整形用品  
一般医療機器 鉗子 (10861001)

## フレキシブルグリップ用鉗子

### 【 警告 】

1. 使用前に滅菌すること

### 【 禁忌・禁止 】

1. 汚染部位や感染部位に使用しないこと。

### 【 形状・構造及び原理等 】

#### \* [形状]

(材質：ステンレス鋼)



胸骨測定鉗子  
FG0120



グリップ把持鉗子  
FG0130



グリップ把持鉗子 BXI  
FG0130BXI

#### \* [型番]

型番	名称	寸法 (閉時)
FG0120	胸骨測定鉗子	長さ 16cm× 幅 9cm
FG0130	グリップ把持鉗子	
FG0130BXI	グリップ把持鉗子 BXI	

許容範囲±10%

[原理] 咬み合い部をもち、胸骨または胸骨用の固定具を把持する。

### 【 使用目的、効能又は効果 】

本品は、Praesidia 製胸骨固定デバイスに用いる鉗子である。

### 【 使用方法等 】

#### 1. 使用前

使用前に滅菌する。

#### 2. 使用方法

- 1) 胸骨を鉗子等で固定する
- 2) 胸骨間隔を胸骨測定鉗子で測定する。
- 3) フレキシブル グリップをグリップ把持鉗子で把持して、胸骨にはめる。

### 【 使用上の注意 】

本品の使用は医師のみに限ること。

### 【 貯蔵・保管方法及び使用期間等 】

周囲温度: 室温、湿度: 90% 以下 (結露しないこと)、  
直射日光に長時間さらされないこと

### 【 包装 】

清浄な袋の包装。

### 【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等 】

#### 製造販売業者

名称: 日本ビー・エックス・アイ株式会社  
住所: 東京都新宿区四谷本塩町 14 番 10 号  
TEL: 03-5315-0191

#### 製造業者

名称: Praesidia 社 (プレシディア社)  
国名: イタリア