

医療用品（4） 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

ガードスティック

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

本品は、不織布にアクリル系粘着剤を塗布したテープに、不織布パッドの上にセルロース不織布パッドを積層した救急絆創膏である。

本品は滅菌済である。

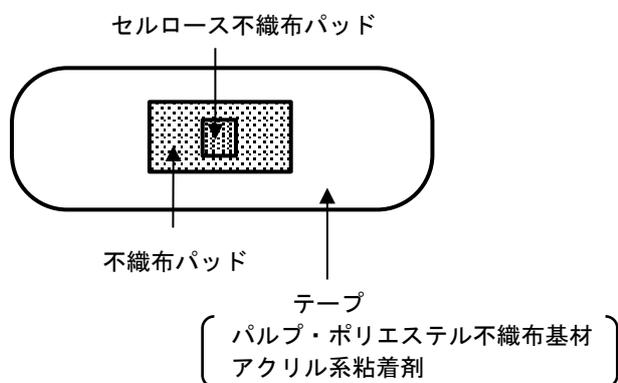

品番	サイズ		
	*テープ	パッド	積層パッド
M	20mm×72mm	13mm×22mm	7mm×7mm
L	30mm×72mm	22mm×29mm	9mm×9mm

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、創部にパッド部分をあて周りのテープ部分で伸ばさずに貼付する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行なうこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、血液や滲出液などのにじみがみられた場合は、直ちに新しいものと貼りかえること。

2. その他の注意

- 1) 包装に汚損、破損、水濡れなどがみられた場合には使用しないこと。
- 2) 開封後、直ちに使用すること。
- 3) 剥がす時は、皮膚を痛めないよう体毛の流れに沿ってゆっくり剥がすこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する
使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

ニチバンメディカル株式会社

〒838-0815 福岡県朝倉郡筑前町野町字禅門橋 1713

(TEL) 0946-24-8021