

医療用品 (4) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDN コード 34864000

透析用絆創膏 透析バン


再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリプロピレン不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、積層不織布パッドからなる透析処置後の穿刺部被覆保護材である。

本品は、滅菌済みである。

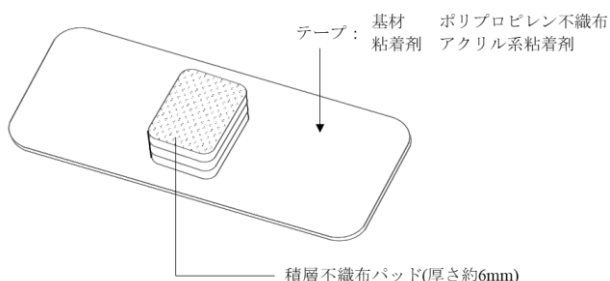

基材色 : ベージュ色

品番	サイズ	
	テープ	パッド
TSB8039	39mm×80mm	22mm×15mm (約6mm厚)

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、穿刺部にパッドを当てて周りのテープで固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- (2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や浸出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

2. その他の注意

- (1) 開封後は、直ちに使用すること。
- (2) 使用後は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

2. 使用期限

個箱に表示（自己認証データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

ニチバンメディカル株式会社

〒838-0815 福岡県朝倉郡筑前町野町字禅門橋 1713

(TEL) 0946-24-8021