

医療用品 (04) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 (JMDN コード：34864000)
ハイドロクリア

再使用禁止

【警告】

次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- 糖尿病や血行障害の治療を受けている人。
- 強い倦怠感を感じたり、発熱があるなど全身症状が良くない人
- 明らかな臨床的創感染を有する人。

【禁忌・禁止】

一度使用したものを再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリウレタンフィルムの防水性外層、吸水体として粘着性を持ったハイドロコロイドからなる皮膚粘着層及びシリコーン剥離紙（セパレーター）からなる。

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

被覆してある両端の剥離紙（セパレーター）をはぎ、傷口又は創傷部位を保護するように貼り付ける。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の成分に対してアレルギーを有する患者には使用しないでください。
- 2) 一度使用したものは再使用しないでください。
- * 3) 次のところには使用しないでください。
 - (1) 臨床的感染を有する傷口又は創傷部位（ズキズキした痛みが続く場合、傷口又は創傷部位の周囲が赤い、熱・腫れ等の異常が見られる場合）
 - (2) 臨床的感染を起こす可能性のある傷口又は創傷部位（深い傷又は創、ガラス・木片・砂等の異物が入っている傷又は創）
 - (3) 壊死組織を有する傷口又は創傷部位
 - (4) 膿を持つ等の異常が見られる傷口又は創傷部位
 - (5) 目の周囲、粘膜
 - (6) 原因不明の傷口又は創傷部位
- 4) 糖尿病や血行障害の治療を受けている患者は、使用前に医師に相談してください。
- 5) 本品の使用中に傷又は創に本品が原因と推察される臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 6) 本品を使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。

- 7) 傷又は創周辺部に粘着剤による発赤や浸出液の貯留による浸軟を起こす場合があります。また、皮膚剥離を起こす場合もありますので、本品の関与が否定できない異常が見られた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- 8) 浸出液の漏れが起こることがあるので、その前に新しい本品と交換してください。
- 9) 本品は外用のため、内服しないでください。また、誤飲には十分注意して使用してください。
- 10) 本品を小児に使用させるときは、保護者の指導監視のもとに使用してください。また、2 歳以下の乳幼児には使用しないでください。
- 11) 本品の開封後は包装袋を密閉し、保管してください。また、本品開封後は使用期限にかかわらず、できるだけ早く使用してください。

2. 不具合・有害事象

一般的な救急絆創膏の使用における「不具合・有害事象」

- ・ 創の感染症状
- ・ 創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、掻痒、アレルギー、接触性皮炎）
- ・ 固着
- ・ 壊死組織の増加
- ・ 疼痛

3. その他の注意

- 1) 使用時に包装が破損又は汚損している場合は使用しないでください。
- 2) 個包装内の製品に不良が見られた場合には、使用しないでください。
- 3) 小児の手の届かないところに保管してください。
- 4) 次亜塩素酸液や過酸化水素液等の酸化剤との併用はしないでください（ポリウレタン成分を分解することがあるため。）。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

高温多湿、直射日光を避けて、室温で保管してください。

有効期間

製品包装に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：J P S 株式会社

電話番号：03-5992-0760

製造業者：株式会社シンヤ