

2017 年 8 月作成（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2005 年 8 月作成（第 1 版）

届出番号：01B1X00001000201

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ JMDN コード：32374000

滅菌ガーゼX

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと。
- X線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存する可能性があるため、X線造影系部分以外のガーゼを挟んで使用すること。

【形状・構造及び原理等】

綿 100% のガーゼに X 線造影系を織り込んだもの。

同一包装内に複数本品が含まれる場合がある。

X 線造影系：(固定材：ポリプロピレン・ポリエステル、
造影剤：硫酸バリウム、着色剤：黒色顔料)

【使用目的又は効果】

出血の制御、液の吸収、薬剤の塗布、擦過傷、乾燥又は汚染からの
器官の保護。

X 線造影剤により X 線透過装置を用いて本品の位置を特定できる。

【使用方法等】

滅菌バックを開封し製品を取り出す。

本品を適宜使用する。

【使用上の注意】

体内へ留置しないこと。

本品は、再滅菌しないこと。

高温を発する機器類に接しないように注意すること。

包装が破損又は汚損、水濡れしている場合は使用しないこと。

本品は滅菌済み製品なので、使用直前に開封して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

使用期限：個包装および外箱に記載〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

日本メディカルプロダクツ株式会社

TEL：0166 - 32 - 5320