

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 X 線造影材入り スポンジ JMDN コード：13705000

メディガーゼX

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと
3. X 線造影糸部分をつかまないことガーゼや X 線造影糸に強い負荷がかからないように使用すること
(X 線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
日本メディカルプロダクツ株式会社
TEL：0166 - 32 - 5320

【形状・構造及び原理等】

1. 本品はセルロース系不織布 100%の平織りガーゼ数枚を重ね、綿 100%の糸で縫製したもので、通常は 4 角形で、その 1 角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取りつけてあるものもある。
また、体内残留防止のため X 線造影用の糸を 1 本以上含有している。
2. 同一包装内に複数本品が含まれる場合がある。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹術中に身体内部で用いる器具である。
X 線造影糸により X 線透過装置を用いて本品の位置を特定できる。

【使用方法等】

1. 滅菌パックを開封し製品を取り出す。
2. 本品を最適位置に配置する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 体内へ留置しないこと。
2. 本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー性症状を起こした場合には、ただちに本品の使用を中止し、適切な処置をすること。

＜その他の注意＞

1. 本品は、再滅菌しないこと。
2. 高温を発する機器類に接しないように注意すること。
3. 包装が破損又は汚損、水濡れしている場合は使用しないこと。
4. 本品は滅菌済み製品なので、使用直前に開封して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
室温保管すること。
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
使用の期限：個包装および外箱に記載〔自己認証（当社データ）による〕