

エンドフロー

**

【警告】

- ・爆発のおそれのある場所では使用しないこと。
- ・加圧加温チャンバのドアを閉じる前に、併用するチューブセットが液体バッグに確実に接続されているか確認すること。[接続されていないと、液体の代わりに空気が患者に注入され、ガス塞栓症を引き起こし死亡に至るおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成および外観

- ① 加圧加温チャンバ
- ② シールプラグ用ハウジング
- ③ 自動式開閉ドア
- ④ タッチスクリーンコントロールパネル
- ⑤ 吸引ポンプ検出スイッチ
- ⑥ 蠕動吸引ポンプ
- ⑦ ラベル
- ⑧ 電源コネクタ
- ⑨ 等電位接地端子
- ⑩ エアコネクタ
- ⑪ フットスイッチコネクタ
- ⑫ メンテナンス用 USB コネクタ
- ⑬ (※⑤・⑥はダブルチャンバのみ)

<シングルチャンバタイプ>



<ダブルチャンバタイプ>



**2. 併用する医療機器

販売名	届出番号
エンドフロー トラクサーフロー チューブセット	13B1X00113000013
エンドフロー ウロ&ギネ ラパ ロ チューブセット	13B1X00113000015
製造販売業者:エダップテクノメド株式会社	

【使用目的又は効果】

**本器具は、体腔又は管腔の内視鏡による観察を容易にするため生理食塩水等を体内に流入させ灌流・吸引(洗浄効果)する器具である。

【使用方法等】

**1. 使用方法

<灌流>

- ** (1) 灌流セットのクランプを閉じる。保護キャップを外し、スパイクを液体バッグに取り付ける。
- (2) シールプラグをホルダに取り付ける。
- (3) アプリケーションが正常に検知されたら OK を押し確

認する。

- (4) 画面中の圧力単位を選択する。


- ** (5) ドアをカチッという音がするまで閉める。ドアは自動でロックされ、液体バッグが加圧される。

<吸引>

- (1) キーリングシステムコネクタをハウジングに留める。
- (2) パイプのフレキシブル部分をポンプヘッドに配置しカバーを閉める。
- (3) タッチスクリーンの左上のポンプアイコンを押し速度を選択する。

**2. 使用方法に関連する使用上の注意

- ・スクリーン上に表示される圧力と同等の値が得られるよう、当該製品と患者の高さが等しくなるように設置すること。

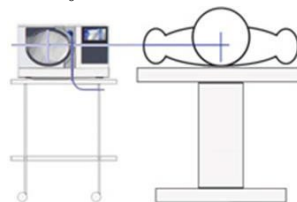

**

**【保管方法及び有効期間等】

*

保管の条件

- ・温度：6 ～ 70℃
- ・湿度：0 - 90 %
- ・気圧：59.5 - 101.3kPa

**

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

エダップテクノメド株式会社