


器具機械（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 31776000

NIKKO マイクロミラー N-15

【禁忌・禁止】

本品の金属又は金属成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

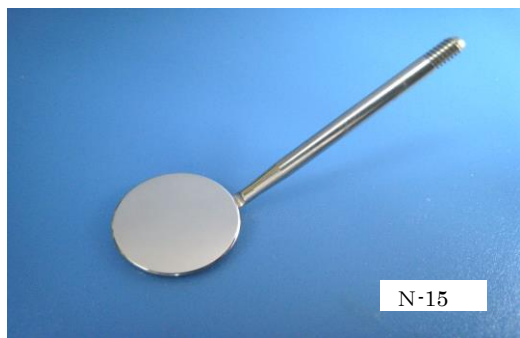

〔原材料〕 ステンレス

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

〔効果〕

本品は表面反射効果により、歯牙の根管口・根管内外が鮮明に見える。また、ガラス製歯鏡の様に 1 面反射と 2 面反射とが重ならないので目の疲労が軽減される。

【使用方法等】

本品を患者の口腔内に入れて診査し、う蝕等を発見することができます。

〔使用方法に関する使用注意〕

- ① 本品の再使用する際には、患者毎に滅菌を行い感染防止に配慮すること。
- ② 損傷、変形（錆・表面キズ・曲がり・汚染）等の有る物は使用しないこと。
- ③ 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
- ④ 本品はステンレス製で歯科用消毒は可能ですが、長時間薬液中に浸漬させないこと。オートクレーブ・EOGの使用は可能。次の薬液消毒剤は金属腐食を起こす恐れがあります使用しない事。超酸性水・次亜塩素酸 Na・塩化ベンザルコニウム・ポビドンヨード・ホルマリン・フェノール・グルコン酸クロルヘキシジン・止血剤・フッ化ジアンミン酸等。

★★ 弊社推奨複合消毒法、

ステップ 1.（菌やウイルスの除去と一定のタンパク除去）

高濃度次亜塩素酸弱酸性水（フィリオ 30）にて、スプレークリーニング 1 分間放置 2 回行い流水洗浄。

ステップ 2.（十分な洗浄とタンパク除去）

オキシドール系弱アルカリ洗浄剤（洗浄ルネサンス）にて 200 倍希釈、10 分浸漬後流水洗浄。

ステップ 3. 化学的殺菌・消毒剤（グルタール製剤）等を含む

高水準消毒薬で浸漬洗浄・流水洗浄・拭き取り乾燥を行う。本品の薬液消毒後は、必ず鏡面の表裏面を『温かいお湯』

下で付着した薬液を十分洗い流してください。

なお、『乾燥ムラ』を防ぐため水切りを十分行ない滅菌袋に入れ滅菌処理を行なうこと。

- ⑤ 本品は、超音波洗浄はできません十分注意すること。
- ⑥ 強アルカリ・強酸性洗剤等の消毒剤は、器具を腐食させる

恐れがあります使用を避けること。また、金属タワシ・クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するため汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

⑦ オートクレーブ滅菌器等の高圧蒸気滅菌器は以下に留意する事。

- 乾燥温度及びチャンバー内温度に注意する。
- チャンバー内が高温となる恐れがある場合には予熱乾燥を行う。高温の乾燥は器具の変質又は変色・劣化・破損等を起こすことが有る。ヒーター付近に本品を置かない。
- 長期間の反復オートクレーブ滅菌器等の高圧蒸気滅菌器により本品鏡表面の光沢を失うことが有る。

⑧ 歯科小器具専用防錆剤入り洗浄剤を使用する際、洗浄剤メーカー説明書に従うこと。

⑨ 本品を洗浄・消毒する場合にはゴム手袋等を着用すること。

【使用の注意】

1) 使用注意

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ② 使用前に必ず、洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。洗浄・滅菌は、[使用方法に関連する使用上の注意]③ & ステップ 1～3&④⑤⑥⑦⑧を参照のこと。
- ③ 破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- ④ 使用後は器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

2) 重要な基本的注意

本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

有害事象

皮膚炎などの歯科金属疹（遅発生金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期限等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ① 直射日光のあたる場所や、高温、水、湿気の多い所を避けて保管すること。
- ② 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ③ 適切な保管・管理をすること。

〔使用期限等〕

本品は、使用有効期限等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事が有るため安全管理上新しい物と適時交換すること。

【保守・点検に係る事項】

使用（滅菌）前後に、汚れ・傷・曲がり等異常がないか点検すること。

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社 日本歯科工業社

電話番号：03-3836-2191

FAX 番号：03-3836-2199

http://www.kk-nikkosha.com

製造業者：協和精工株式会社 本社工場

〒 012-1103

住所：秋田県雄勝郡羽後町林崎字三ツ盛 34-1