


類別：機械器具 24 運動機能検査用機器
一般医療機器 歩行分析計(JMDNコード 35757000)

「F-スキャン II」の付属品
(F-スキャン II センサシート)

【形状・構造及び原理等】

(1) 構造

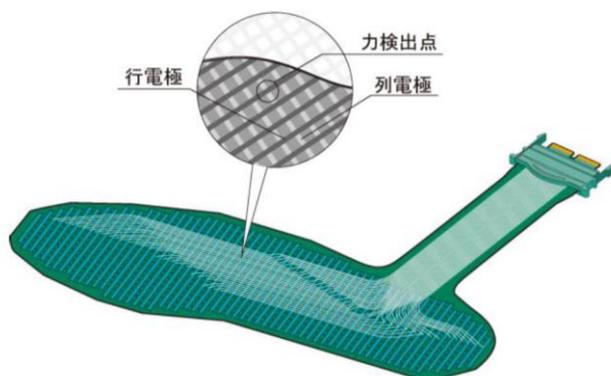

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者
名称:ニッタ株式会社
連絡先:03-6744-2720

(2) 寸法

外形: 幅 114mm×長さ 313.7mm
感圧部 : 幅 106.7mm×長さ 304.8mm

(3) 材質

ポリエステルフィルム(ポリエチレンテレフタレート)

(4) 動作原理

センサシートは厚さ約 0.1mm のフィルム状シートで、加わる力の大きさに応じて電気抵抗値が変化する特殊インクで薄膜が形成されています。薄膜の上下には一定間隔で格子状に電極が配列されており、これらの交点が個別の力検出点となっています。

【使用目的又は効果】

歩行分析計 F-スキャン II において、圧力を検出するセンサシートとして F-スキャン II 本体に接続して使用する。

【使用方法等】

ご使用にあたっては、歩行分析計 F-スキャン II の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

- 1) センサシートを対象者の足の大きさにトリミングする。
- 2) センサシートを対象者の靴の中に装着する。
- 3) センサシートをセンサコネクタに接続する。

【保守・点検に係る事項】

(1) 洗浄、消毒、滅菌方法

オートクレーブ滅菌(高圧蒸気滅菌)や消毒液に浸しての消毒は出来ません。70%イソプロピルアルコール溶液などの消毒液を含ませた脱脂綿等で拭き取って消毒してください。

(2) 使用者による保守点検事項

使用前に必ず下記を確認すること。(毎回)

- ・センサシートに破れや破損が無いこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい